



ZDRAVOTNÍ KOČÁREK KUKINI™



Návod k použití





Výrobce přebírá odpovědnost za správné používání zařízení pouze v případě, že byl výrobek zakoupen u kvalifikovaného zaměstnance Akces-MED Ltd. nebo ve specializovaném zdravotnickém obchodě!



Akces-MED. Ltd. si vyhrazuje právo bez upozornění zavádět technické a obchodní změny v obsahu pokynů.



Výrobek označený značkou CE je zdravotnický prostředek třídy I, pravidla 1, v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.



Akces-MED sro zavedla systém managementu jakosti ISO 13485 pro výrobu, prodej a servis. Systém je certifikován společností Det Norske Veritas.

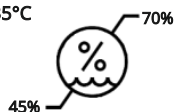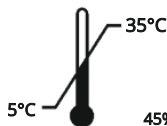



OBSAH

1. Účel návodu k použití.....	5
2. indikace a kontraindikace použití.....	5
3. Obecný popis kočárku.....	6
3.1 Standardní vybavení.....	6
3.2 Příslušenství.....	7
4. Tabulka rozměrů.....	8
5. Jak používat kočárek.....	9
5.1 Rozložení kočárku.....	10
5.2 Složení kočárku.....	11
5.3 Stupačka.....	12
5.4 Vyjmutí kol.....	13
5.5 5ti-bodový bezpečnostní pás.....	14
5.6 Nastavitelná zádová opěrka.....	17
5.7 Nastavitelné vodící madlo.....	18
5.8 Centrální brzda / ruční brzda.....	18
5.9 Nastavení pružin.....	19
6. Příslušenství.....	20
6.1 KKN_160 Octagon hlavová opěrka.....	20
6.2 KKN_161 Nožní a kotníkový stabilizační pásy / KKN_162 Dynamická kotníková stabilizátor (FP-22).....	21
6.3 KKN_405 Sklápěcí stříška.....	22
6.4 KKN_411 Držák nápojů / KKN_452 Držák telefonu.....	24
6.5 KKN_630 Cyklistická tažná tyč.....	24
6.6 KKN_626 EVO modul.....	27
7. Používání kočárku.....	28
7.1 Příprava uživatele.....	28
7.2 Příprava kočárku.....	29
8. Bezpečnostní pokyny.....	30
9. Podmínky odpovědnosti za vady.....	32
10. Údržba a čištění.....	32
11. Označení.....	36
11.1 Symboly.....	36
11.2 Příklad štítku.....	36



Instrukce

Abychom splnili očekávání našich zákazníků, vytvořil tým Akces-MED Ltd. nový speciální kočárek TM KUKINI. Je opravdu lehký, takže se hodí jak na dlouhé procházky, tak na běžecké tréninky. Hliníkový rám kočárku s reflexními prvky činí kočárek bezpečným a pohodlným pro vaše dítě při prozkoumávání města nebo lesních oblastí.

KUKINI je vybaveno zadním systémem tlumení nárazů a 16palcovými nafukovacími paprskovými koly, díky kterým je jízda na nerovném terénu potěšením pro dítě i pečovatele.

Bezpečnost a správné sezení dítěte zaručují 5-ti bodové bezpečnostní pásy s magnetickým zapínáním. Pohodlnou oporu hlavy zajišťuje anatomická opěrka hlavy TM Octagon, kterou lze namontovat v různých výškách. Nastavitelná záďová opěrka umožňuje nastavit optimální polohu pro vaše dítě při jízdě. Rychloupínací systém kol spolu s kompaktní velikostí složeného kočárku usnadňují skladování nebo přepravu. Odolné a pohodlné čalounění má praktickou kapsu na telefon, peněženku nebo klíče.

Aby bylo dítě chráněno před různými povětrnostními podmínkami, může být speciální kočárek TM KUKINI vybaven nastavitelnou skládací stříškou, která poskytuje dodatečnou ochranu před větrem, deštěm nebo sluncem.

Nezapomeňte si pozorně přečíst tuto uživatelskou příručku. Najdete zde nejen užitečné informace, ale také pokyny pro bezpečné a efektivní používání produktu.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte nás kontaktovat:

Lékařský poradce - SIV Kladno s.r.o. : +420 321 003 002

SIV.: +420 321003002

e-mail: info@siv.cz



Před použitím výrobku je uživatel povinen seznámit se s návodem k použití. Pamatujte, že dodržování pokynů je velmi důležité. Zajišťuje bezpečnost a prodlužuje životnost i estetiku zařízení.

1. ÚČEL NÁVODU K POUŽITÍ



Návod k obsluze obsahuje základní informace nutné pro správnou přípravu kočárku před použitím, používání kočárku, údržbu a čištění kočárku.

Tato uživatelská příručka by měla být uložena na snadno přístupném místě. Návod je určen osobám, které se starají o handicapované uživatele, dále lékařům a fyzioterapeutům manipulujícím s kočárkem. Před prvním použitím kočárku je uživatel (nebo pečovatel) povinen seznámit se s návodem k použití.

2. INDIKACE A KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ

Tyto zdravotnické prostředky jsou určeny pro osoby s ortopedickými, neurologickými a kardiologickými onemocněními a pro osoby po operacích, s dysfunkcí pohybového aparátu, které nezískali schopnost samostatného sedu nebo mají potíže se zaujetím a udržením polohy vsedě. Jak pro ochablé lidi se sníženým svalovým tonusem, tak pro lidi se spasticitou. Zařízení může být opravdu užitečné i pro lidi, kteří vyžadují dlouhodobé odlehčení jedné nebo obou dolních končetin. Je nenahraditelným pomocníkem v rehabilitačním procesu, a to jak z hlediska pohybového, tak sociálního začlenění. Zařízení je skvělým pomocníkem při každodenních činnostech, jako je rehabilitace, ale také při hraní, učení nebo stolování. Výběr vhodné velikosti pomůcky závisí na zdravotních indikacích a anatomických parametrech bez ohledu na věk uživatele.

Zařízení se doporučuje lidem v následujících případech:

- Dětská mozková obrna – různé typy a formy
- Poranění mozku a míchy s obrnou a slabostí dolních končetin, poruchy rovnováhy a motorické koordinace s různou etiologií.
- Demyelinizační onemocnění (např. roztroušená skleróza - SM).
- Meningokéla.
- Svalová onemocnění se slabostí a paralýzou (dystrofie, myasthenia gravis, myositida).
- Genetické poruchy.
- Degenerace a neurologická onemocnění.
- Jiné stavy spojené se svalovou slabostí, paralýzou a muskuloskeletálními poruchami.
- Po úrazech hlavy a míchy a úrazech páteře s obrnou a parézou.

Kontraindikace pro sezení:

- Kritický stav uživatele.
- Paralýza.
- Hluboká sedace.
- Nestabilní zlomeniny se specifickými ortopedickými doporučeními, včetně zlomenin páteře.
- Neléčená hluboká žilní trombóza.
- Hemodynamická nestabilita.
- Zjištěná mozková dysfunkce při vzpřímeném sezení.
- Těžká artritida krční páteře.
- Plicní embolie.
- Nedávný infarkt myokardu za posledních 24 hodin.
- Čerstvé pooperační rány nebo nehojící se rány v oblasti zad, oblasti pánevního pletence, kyčelních kloubů a stehen.
- Uživatelé s duševními poruchami by neměli být ponecháni v zařízení bez dohledu pečovatele.



3. Obecný popis kočárku

3.1 Standardní vybavení

- ① Skládací hliníkový rám vybavený kotoučovou brzdou na předním kole a centrální brzdou na zadních kolech
- ② Ergonomické vodící madlo
- ③ Zádová opěrka s nastavitelným sklonem a kapsou
- ④ 5ti-bodový bezpečnostní pás s magnetickým zámekem
- ⑤ Sedací polštář s VISmemo pěnou
- ⑥ Nastavitelná stupačka
- ⑦ Odnímatelná nafukovací zadní kola
- ⑧ Odnímatelné foukací přední kolo
- ⑨ Voděodolný potah HYDRO
- ⑩ Speciální zámek kočárku proti samovolnému rozložení s magnetickým zapínáním





3.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ



KKN_001



LED osvětlení



KKN_147



5ti-bodové pásy stabilizující nohy na stupáče



KKN_160



Octagon hlavová opěrka



KKN_161



Nožní a kotníkové stabilizační sandály



KKN_162



Dynamické kotníkové stabilizátory (FP-22)



KKN_405



Sklápěcí stříška



KKN_411



Držák nápojů



KKN_452



Držák telefonu



KKN_501



Taška



KKN_509



Organizátor



KKN_626



EVO modul




KKN_630



Cyklistická tažná tyč



4. TABULKA ROZMĚRŮ

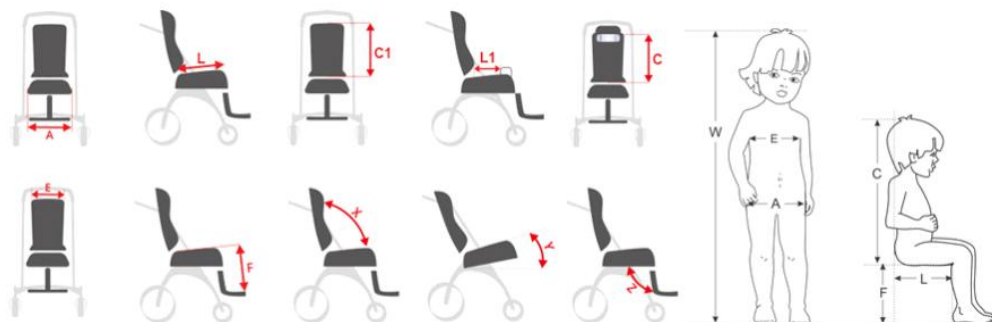

Symbol	Rozměr	Jednotka	Velikost 1
W	Indikativní hmotnost uživatele*	[cm]	100 - 135
A	Šíře sedu	[cm]	37
L	Hloubka sedu	[cm]	37
C ₁	Výška zádové opěrky	[cm]	57
C	Výška hlavové opěrky	[cm]	47 - 60
E	Šířka zad	[cm]	36
F	Délka stupačky	[cm]	27, 40
	Výška vodícího madla	[cm]	82 - 120
X	Úhel sklonu zad	[°]	100 - 120
Y	Úhel sklonu sedu	[°]	20
Z	Úhel sklonu stupačky	[°]	125
	Nosnost	[kg]	40

* Hodnota nemůže být hlavní faktor pro výběr velikosti produktu

Hmotnost a rozměry

Rozměry	Velikost 1
Šířka	[cm] 67
Šířka při složení**	[cm] 54
Délka (min - max)	[cm] 124 - 143
Délka při složení**	[cm] 97
Výška	[cm] 105
Výška při složení**	[cm] 38
Hmotnost	[kg] 14

POZNÁMKA: Rozsah tolerance měření je +/- 1 cm / 1/2 palce

POZNÁMKA: Přibližné hodnoty v závislosti na konfiguraci produktu

** Rozměry po složení jsou pro kočárek s odpojenými koly a odepnutou podnožkou

5. JAK POUŽÍVAT KOČÁREK

Vysvětlivky



Informační ikona – objeví se v návodu, když je třeba číst doplňující informace.



Informační ikona – objeví se v návodu, když je třeba zmáchnout tlačítko ukázané na obrázku



Varující ikona – objeví se v návodu, když je třeba dbát na speciální opatření.



Nesprávné nastavení produktu může vést k takovým nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, tělesné deformace, přetížení kloubů atd. Pokud se objeví výše uvedené příznaky, okamžitě přestaňte produkt používat, vyjměte uživatele z produktu a položte jej. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, okamžitě kontaktujte lékaře. Pokud příznaky vymizely, informujte o této skutečnosti ošetřujícího lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším postupu rehabilitace.

Vážné incidenty týkající se tohoto zařízení by měly být hlášeny oběma výrobcí a příslušnému úřadu ve vaší zemi

5.1 ROZLOŽENÍ KOČÁRKU



Při rozkládání držte uživatele v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí kočárku. Hrozí vážné nebezpečí zranění



Pozor si dejte především na skládací části rámu kočárku, které představují riziko zranění.

Mezi pohyblivými částmi kočárku nesmí být žádné čalounění.



Před použitím kočárku zkontrolujte, zda jsou všechny prvky správně zajištěny.

5.2 SLOŽENÍ KOČÁRKU



Pozor si dejte především na skládací části rámu kočárku, které představují riziko zranění.
Mezi pohyblivými částmi kočárku nesmí být žádné čalounění.






5.3 STUPAČKA



Pro změnu výšky stupačky stiskněte páčky umístěné na obou stranách stupačky.
Výšku podnožky je možné nastavit ve dvou úrovních.
Nezapomeňte zajistit kryt opěrky nohou upevněním pásu za konstrukcí opěrky
nohou (obr. 14 – 15)

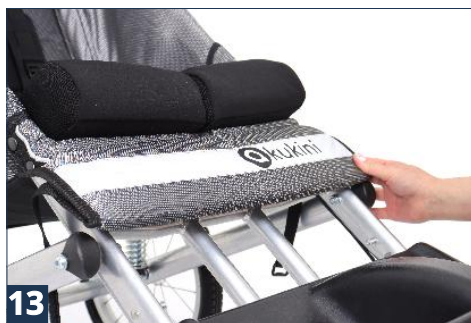



5.4 VYJMUTÍ KOL

Přední kolo




zadní kola



5.5 5TI-BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY





i


Pásky lze namontovat v požadované výšce na zádovou opěrku kočárku - nepamenejte namontovat oba horní popruhy 5bodových bezpečnostních pásů ve stejné výšce.

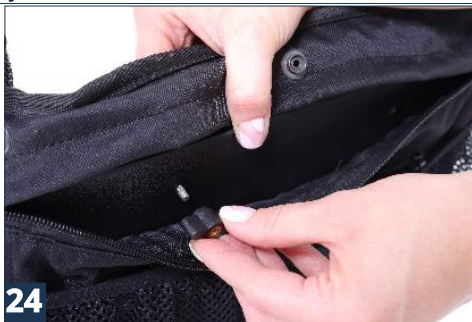

i

Horní popruhy se zapínají za zádovou opěrkou kočárku.
Po otevření kapsy opěradla zajistěte horní popruhy maticemi.

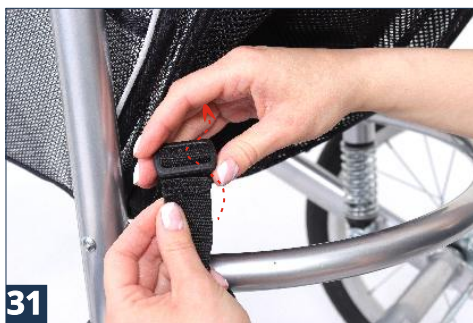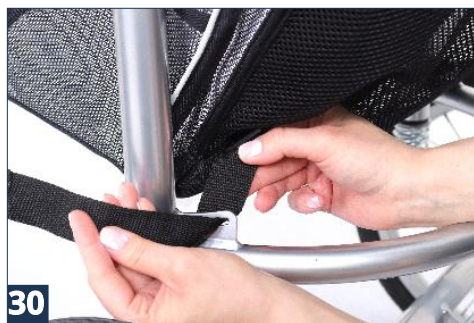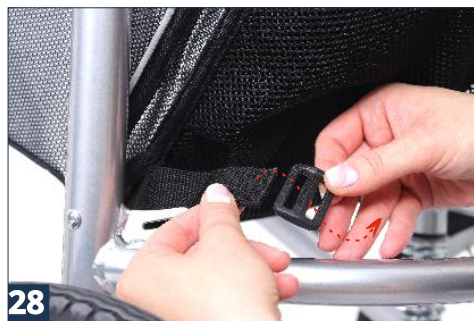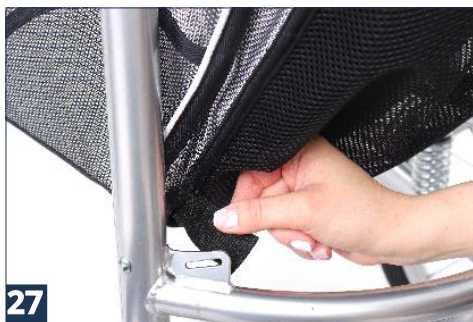

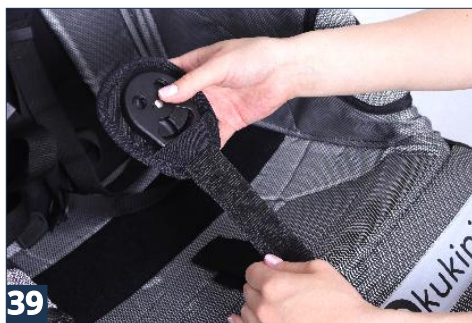



Před každým použitím kočárku zapněte 5-ti bodové bezpečnostní pásy a zkontrolujte, zda jsou správně zapnuty.

5.6 NASTAVITELNÁ ZÁDOVÁ OPĚRKA





Před použitím kočárku zkontrolujte, zda je správně zajištěn aretační prvek úhlu zádové opěrky. **Nosnost kapsy na zádové opěrce je 1 kg!**



5.7 NASTAVENÍ VODÍČÍHO MADLA



5.8 CENTRÁLNÍ BRZDA / RUČNÍ BRZDA

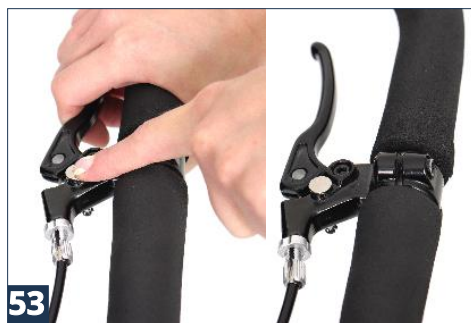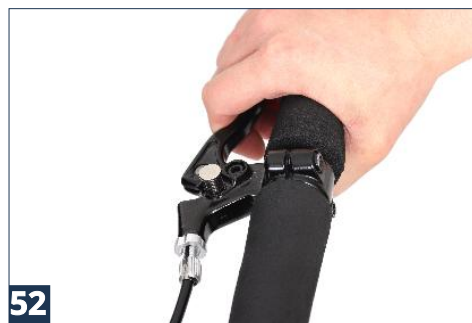

Ruční brzdu můžete zablokovat stisknutím zajišťovacího mechanismu (obr. 53).

Před použitím zkontrolujte, zda správně fungují brzdy – kočárek by měl být naložený.

5.9 NASTAVENÍ PRUŽIN







Je možné měnit tuhost pružin kočárku, což umožňuje vyztužení konstrukce nebo zvýšení jejího tlumení.

Nastavení by mělo být provedeno pomocí klíče, který je součástí sady.



6. PŘÍSLUŠENSTVÍ

6.1 KKN_160 OCTAGON™ HEADREST

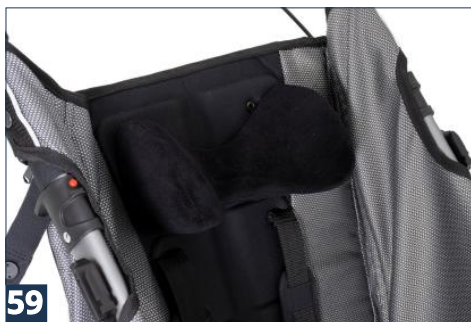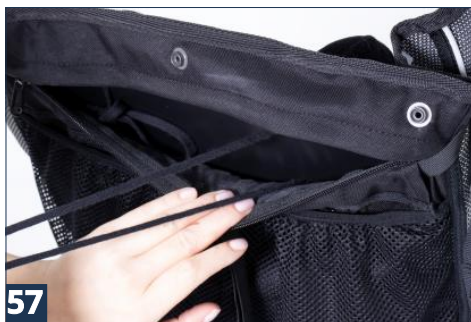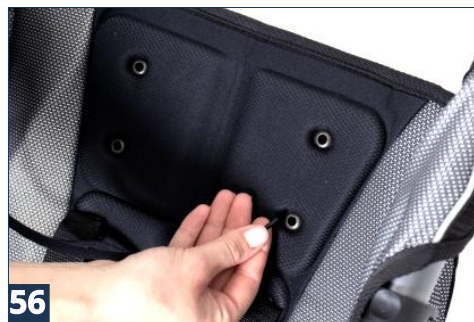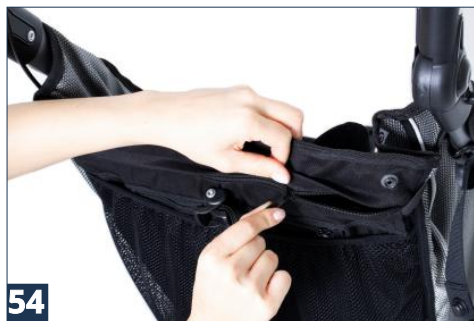



6.2 KKN_161 NOŽNÍ A KOTNÍKOVÝ STABILIZAČNÍ PÁSY KKN_162 DYNAMICKÁ KOTNÍKOVÁ STABILIZÁTOR (FP-22)



54



55



Dbejte na to, aby popruhy stabilizující nohy a kotníky sandálů nebyly příliš dlouhé - jinak hrozí zachycení o přední kolo kočárku. Upravte délku popruhů přestřižením tak, aby nevisely pod podnožkou. Nezapomeňte také upravit délku popruhů, aby byly sandály bezpečně připevněny k podnožce.



56



57



58




59









6.3 KKN_405 SKLÁPĚCÍ STŘÍŠKA

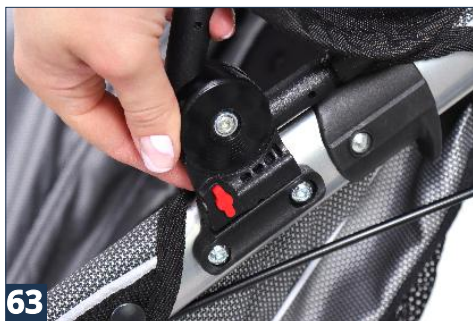

i

Chcete-li skládací stříšku sejmut, stiskněte tlačítka na obou stranách montážních prvků na rámu (obr. 64) a vytáhněte ji.




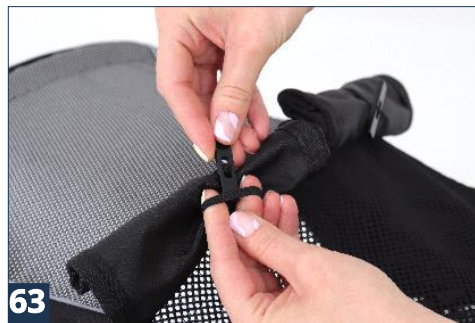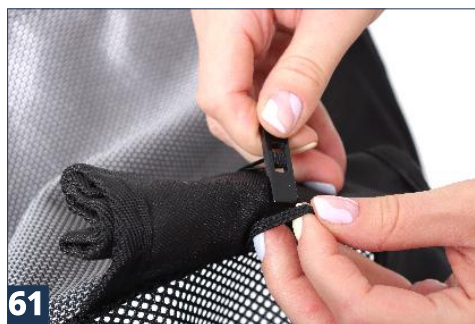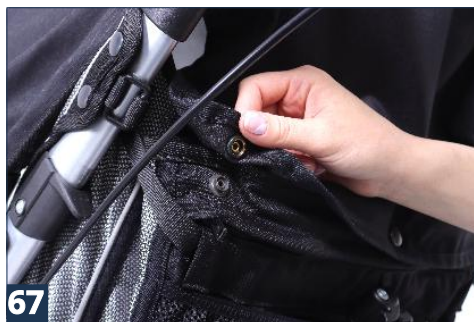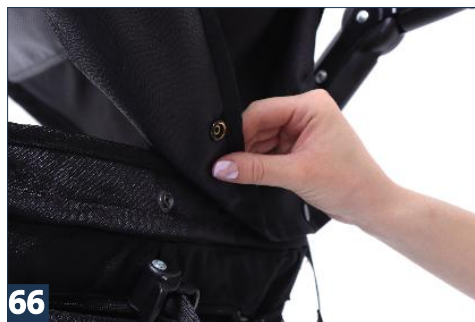

6.4 KKN_411 DRŽÁK NÁPOJŮ KKN_452 DRŽÁK TELEFONU


65

66

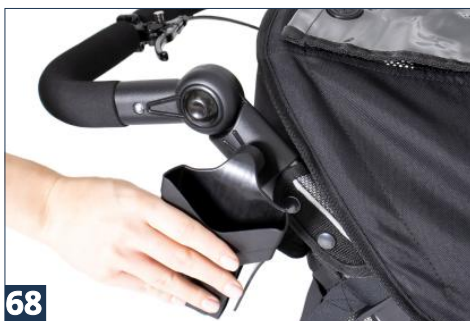67

68

6.5 KKN_630 CYKLISTICKÁ TAŽNÁ TYČ



Namontujte táhlo tažného zařízení na jízdní kolo, jak je popsáno v pokynech dodaných se sadou.




69

70



Před montáží tažné tyče na kolo
sejměte přední kolo kočárku (viz str.
13, bod 5.4 Demontáž kol - přední kolo,
obr. 18-20)



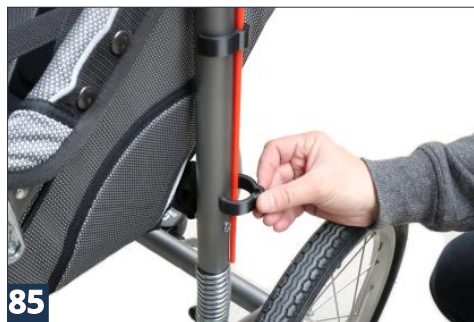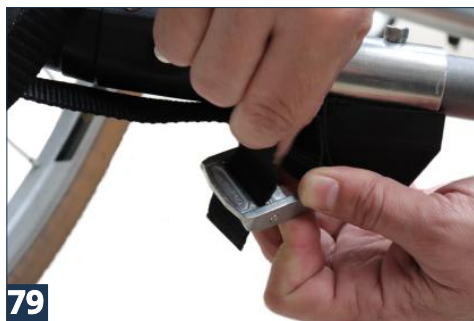



6.6 KKN_626 EVO MODUL

i

Před montáží modulu EVO demontujte přední kolo kočárku (viz strana 13, bod 5.4 Demontáž kol - přední kolo kolo, obr. 18 – 20).



7. POUŽÍVÁNÍ KOČÁRKU



Kočárek KUKINI musí být používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce. Nezapomeňte produkt používat pouze s někým, kdo je vyškolený a znalý.

Před použitím kočárku nezapomeňte připravit jak produkt, tak pacienta!

7.1 PŘÍPRAVA UŽIVATELE

Před použitím produktu je nezbytné se ujistit, že:

- oblečení uživatele je lehké a doporučuje se pohodlné sportovní oblečení;
- boty by měly být pohodlné a navíc by měly stabilizovat kotník;
- z hygienických důvodů a z důvodu zamezení oděru je vhodné, aby pacient při používání přístroje měl vždy na sobě oděv, pokožka nesmí být nahá, zejména v místech pravidelného kontaktu s čalouněním;
- drény, sáčky, katétrů atd., pokud jsou použity, musí být zajištěny, aby správně fungovaly a nerušily při používání produktu;
- je-li nutné, aby uživatel nosil ortopedické pomůcky (límeč, korzet, ortéza, boty), pokud je to doporučeno lékařem.



Oblečení by mělo chránit pokožku pacienta před přímým kontaktem s čalouněním a dalšími částmi vybavení. O použití jakéhokoli druhu ortopedické pomůcky může rozhodnout pouze lékař!



7.2 PŘÍPRAVA KOČÁRKU

1. Před použitím je nutné:

- rozložte zařízení;
- umístěte zařízení na rovný povrch;
- ujistěte se, že všechny díly jsou provozuschopné, správně namontované a stabilní;
- zablokované brzdy;
- přizpůsobit zařízení uživatelským měřením;
- rozepněte bezpečnostní pásy, aby se uživatel mohl snadno umístit do zařízení;
- umístit uživatele do zařízení;
- upevněte všechny prvky, které stabilizují uživatele, např. bezpečnostní pásy;
- namontovat další zařízení, např. stabilizační sandály pro nohy a kotníky.

2. U pacientů, kteří mají problém s močovým měchýřem, je nutné na sedadlo nasadit speciální podložku. Tuto podložku lze zakoupit v lékárně nebo v lékárnách.



V případě jakýchkoliv překážek, jako je schod nebo obrubník, je nutné zvednout přední kola stisknutím rukojeti dolů. Dále položte přední kola na schůdek a poté zvedněte zadní část kočárku pomocí rukojeti.

**Dávejte pozor, abyste kočárek příliš nenaklonili dozadu.
Nezapomeňte umístit kočárek dopředu.**

Při používání je nezbytné držet kočárek pomocí rukojeti, jinak se může kočárek převrátit.

Před použitím výrobku je velmi nutné se ujistit, že všechny pásy a bezpečnostní zařízení jsou správně připevněny a seřizeny.

Navíc zkontrolujte, zda se tlakem neuvolňují a navíc se ujistěte, že jsou spony z nastavitelných prvků pevně utaženy!

Zařízení funguje správně pouze tehdy, když je zařízení nastaveno podle výšky a hmotnosti uživatele. Nezapomeňte vzít všechny tyto míry v úvahu při nákupu produktu. Správné seřízení je nejdůležitější, protože jedině tak je výrobek bezpečný. Je zakázáno nutit dítě do určité polohy, protože se bude cítit nepohodlně a může to vést k nesprávnému držení těla.



8. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Kočárek KUKINI musí být používán v souladu s pokyny v této uživatelské příručce.

Pro správné rozhodnutí o výběru kočárku a jeho velikosti je velmi důležité poradit se s lékařem nebo fyzioterapeutem. Před použitím zařízení je také nezbytné seznámit se s pokyny popsány v uživatelské příručce.

1. Před použitím je nutné:

- ujistěte se, že nedochází k poškozením nebo jiným závadám, které by mohly ohrozit život uživatele; zkontrolujte, zda všechny díly fungují a jsou správně namontovány a navíc zkontrolujte, zda nejsou rozbité,
- zkontrolujte, zda jsou dotaženy všechny šrouby, knoflíky a všechny lepené, šité nebo závitové díly,
- zkontrolovat, zda brzdy fungují správně,
- zkontrolujte, zda přezky fungují správně
- vždy používejte bezpečnostní pásy, pásy na suchý zip by měly přesahovat min. 8 cm
- upravit zařízení podle měření a potřeb uživatele, např. seřízení peloty, nášlapné desky atd.,
- upravit zařízení podle měření a potřeb uživatele, např. seřízení podnožky atd.,
- zajistěte uživatele pomocí prvků, jako jsou nožní stabilizační pásy, opěrka hlavy atd. Zabezpečení uživatele je velmi důležité, protože chrání před vypadnutím.
- zkontrolujte, zda jsou kola správně namontována a nahuštěna, pokud není dostatek vzduchu, musí být kola nahuštěna na maximální tlak 2,4 baru.

2. Je zakázáno používat kočárek k jiným účelům, než ke kterým je určen.

3. Je zakázáno používat kočárek, pokud je poškozený nebo chybí jakákoliv část.

4. Je zakázáno ponechat uživatele bez dozoru.

5. Kočárek by měl být používán pouze tehdy, je-li k dispozici někdo, kdo je vyškolený a znalý.

6. Je zakázáno nechávat kočárek s uživatelem na nestabilní zemi bez dozoru, i když je zabrzděná brzda.

7. Je zakázáno chodit po schodech nahoru nebo dolů; nezáleží na tom, zda je uživatel umístěn v zařízení nebo ne.

8. Při nastupování a vystupování z kočárku je důležité zabrzdít.

9. Ujistěte se, že uživatel nestojí na stupačce při nastupování a vystupování z kočárku.

10. Ujistěte se, že všechny končetiny nejsou blízko paprsků nebo jiných nastavitelných prvků.
11. Kočárek by měl být skladován a používán mimo zdroje ohně nebo vysoké teploty. Kočárek by navíc neměl být skladován v místnostech s vysokou vlhkostí.
12. Zajistěte kočárek během přepravy, aby nedošlo k jeho poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávnou přípravou zařízení během přepravy.
13. Před použitím kočárku odstraňte všechny papírové a plastové obaly. Obal není hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat



Nesprávné nastavení produktu může vést k takovým nežádoucím účinkům, jako jsou mdloby, tělesné deformace, přetížení kloubů atd. Pokud se objeví výše uvedené příznaky, okamžitě přestaňte produkt používat, vyjměte uživatele z produktu a položte jej. Pokud nežádoucí příznaky přetrvávají, okamžitě kontaktujte lékaře.

Pokud příznaky vymizely, informujte o této skutečnosti ošetřujícího lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším postupu rehabilitace.

Vážné incidenty týkající se tohoto zařízení by měly být hlášeny jak výrobci, tak příslušnému úřadu ve vaší zemi.

Je zakázáno umístit uživatele do zařízení v autě, autobuse nebo vlaku.

Výrobek obsahuje malé části, které by děti mohly spolknout.

Nepoužívejte výrobek, který nese známky poškození, roztržení nebo opotřebení. Pouze nepoškozený výrobek a správné používání zaručují jeho správné a bezpečné fungování. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Nekvalifikovaná osoba by za žádných okolností neměla opravovat nebo měnit výrobek a jeho konstrukci, protože na tom závisí zdraví a bezpečnost uživatele a také to povede ke ztrátě záruky.

Pamatujte, že všechna břemena zavěšená na rukojeti mohou způsobit ztrátu rovnováhy kočárku.

Hmotnost uživatele by neměla být větší než maximální hmotnost popsaná na straně 8, kde naleznete informace k této problematice.

9. PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

- 1) Akces-MED Ltd. prodává výrobky bez výrobních vad nebo vad.
- 2) Výrobce poskytuje kupujícímu záruku 24 měsíců od data nákupu. Veškeré závady zjištěné během záruční doby budou bezplatně opraveny.
- 3) Veškeré vady, které se objeví po záruční době, lze opravit pouze tehdy, když je uživatel zaplatí. Toto pravidlo se nevztahuje na refundované produkty – uživatel může požádat National Health Refund o refundaci.
- 4) Výrobce tvrdí, že výrobek lze používat 48 měsíců. Po uplynutí této doby může uživatel tento výrobek používat pouze v případě, že odešle zařízení výrobcí do servisu. Dále výrobce opět určí, jak dlouho lze výrobek používat a navíc se určí termín dalšího servisu.
- 5) Pokud je výrobek poškozen, kontaktujte prosím našeho prodejce nebo zákaznický servis Akces-MED Ltd. (tel. +48 17 864 04 77, e-mail: export@akces-med.com).

10. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Kočárek KUKINI, který je zdravotnickým prostředkem, by měl být vždy udržován v čistotě a měl by být používán v souladu s pokyny výrobce. Kočárek by měl být umístěn v čisté, suché a větrané místnosti. Údržbu a čištění je nutné provádět minimálně jednou měsíčně. Pravidelné čištění a údržba kočárku je nezbytná pro zachování jeho správné funkce a bezpečnosti.

Doporučení pro čištění čalounění a dalších prvků kočárku:

1. Umyjte teplou vodou pomocí měkkého hadříku a jemných čistících prostředků.
2. Ujistěte se, že hadřík není příliš mokrá, protože to může zvětšit skvrnu a poškodit čalounění nebo pěnu uvnitř čalounění.
3. Před dalším čištěním nezapomeňte z čalounění odstranit přebytečnou vlhkost.
4. Po vyčištění skvrn je třeba čalounění opláchnout vlažnou vodou a osušit čistým hadříkem.
5. Čalounění nesmíte namáčet.
6. Čalounění nesmí během čištění navlhnout.
7. K čištění čalounění nepoužívejte tvrdé kartáče.
8. Čalounění nečistěte silnými chemikáliemi, např. rozpouštědla nebo žíraviny na bázi chlóru.

9. Během používání kočárků nečistěte, nevyměňujte žádné prvky ani neudržujte.
10. Kovové a plastové prvky čistěte ručně vhodnými čistícími prostředky po přečtení doporučení výrobce daného čističe.
11. Kovové, plastové, dřevěné a čalounické prvky výrobku je možné dezinfikovat běžně dostupným dezinfekčním prostředkem. Za účelem dezinfekce vybraného prvku nastříkejte jeho povrch dezinfekčním prostředkem běžně dostupným na trhu a otřete suchým čistým hadříkem. Po dezinfekci počkejte, dokud prvek zcela nevyschne, zejména v případě čalounění. Před použitím dezinfekčního prostředku nejprve na neviditelném místě zkontrolujte, zda přípravek nezbarví nebo nepoškodí dezinfikovaný povrch.



Pamatujte, že čalounění musí být před použitím vždy suché!
Výrobce kočárku Akces-MED sro neručí za škody způsobené použitím nevhodných čistících prostředků.

Před použitím je nutné:

- čistá kola,
- zkontrolujte, zda jsou základna i kola správně namontovány; zkontrolujte, zda brzda přestane otáčet kolem,
- zkontrolovat, zda konstrukce invalidního vozíku není zlomená nebo bez jakýchkoliv deformací,
- zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části fungují a všechny šrouby, matice, knoflíky atd. jsou správně utaženy,
- zkontrolujte, zda pásy, vesty, kufry, stabilizační pásy nohou atd. nejsou roztřepené; zkontrolujte, zda přezky a svorky fungují správně.



Výrobce přebírá odpovědnost pouze za skryté vady nebo škody, které se objevily i přesto, že uživatel dodržel pokyny.

V případě jakýchkoliv poškození je nezbytné kontaktovat osobu, která vám produkt prodala.



TECHNICKÁ KONTROLA

Technické kontroly by měly být prováděny pravidelně. Před servisem by měl být výrobek důkladně vyčištěn, aby se odhalila všechna skrytá poškození.

Frekvence	Co by mělo být zkontrolováno?	Co by mělo být provedeno?	Poznámky
Před každým použitím	Obecné podmínky produktu	Zkontrolujte: - celkově produkt, zda nemá viditelná poškození, praskliny nebo mechanické vady - zda je produkt kompletní	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Kola a brzdy	Zkontrolujte: - zda jsou kola správně namontovaná a nejsou poškozená, - zda brzdy zabrzdí kola - zda kola nejsou špinavá. Pokud je to nutné, umyte kola.	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Upevnění konstrukčních prvků	Zkontrolujte všechny mechanismy výrobku a jeho pohyblivé části. Zkontrolujte zejména: - je-li sedadlo správně namontováno (je-li k dispozici), - jsou-li kola správně namontována (je-li k dispozici), - jsou-li prvky zajišťující uživatele správně namontovány a zda dobře fungují (pokud je to možné), - pokud jsou všechny pohyblivé části kompletní, fungují správně, nezasekávají se, - pokud správně fungují nastavovací mechanismy následujících prvků (pokud jsou k dispozici): opěrka hlavy, opěrka zad, sedák, abdukční blok, područky, opěrky nohou.	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Čalounické prvky	Zkontrolujte: - zda nedošlo k poškození, natržení, nařiznutí, uvolněním švům nebo deformaci prvků čalounění, - pokud stabilizační popruhy, vesty nebo bezpečnostní pásy nejsou roztržené nebo zkroucené a pokud přezky fungují správně, - pokud stabilizační popruhy, vesty nebo bezpečnostní pásy fungují správně a nerozepínají se pod tlakem nebo při tahu.	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
Jednou týdně	Čištění produktu	Pokud se rám a čalounění při každodenním používání zašpiní (zapráší, ušpiní apod.), otřete je vlhkým hadříkem bez saponátů. Odstraňte nečistoty (např. vlasy, zbytky jídla atd.) z pohyblivých částí výrobku.	Výrobek by měl být čištěn v případě potřeby, nejméně však jednou týdně. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi chlóru ani metylalkohol. Před použitím výrobku zkontrolujte, zda je čalounění suché.



Frekvence	Co by mělo být zkontrolováno?	Co by mělo být provedeno?	Poznámky
Jednou měsíčně	Osy kol, rychloupínáky (pokud jsou k dispozici)	Zkontrolujte: - jestli se kola otáčejí a jestli nejsou uvolněná. Pro údržbu kol naneste mezi nápravu a náboj kola malé množství konzervačního maziva. Zkontrolujte, zda lze kola snadno sejmout a připevnit.	Při znečištění kola očistěte. V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Konstrukční konektory produktu (svažování, závitování, pájení)	Zkontrolujte: - stav rámu výrobku v místech spojování (svary, závit, pájení).	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Pneumatiky/duše (jsou-li k dispozici).	Zkontrolujte: - stav opotřebení pneumatik. Zkontrolujte, zda nejsou viditelné poškození. Zkontrolujte tlak v pneumatikách (je-li k dispozici).	Pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký, nahustěte je na správnou úroveň. V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele/distributora nebo výrobce.
Jednou za 6 měsíců	Konstrukce pohyblivých částí	Zkontrolujte: - pokud nedošlo k poškození pohyblivých částí konstrukce. Udržujte je pomocí vhodného čistícího prostředku.	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
	Označení produktu	Zkontrolujte: - jsou-li označení a štítky čitelné.	V případě jakéhokoli poškození nebo závad přestaňte výrobek používat a kontaktujte svého dodavatele /distributora nebo výrobce.
Po životnosti produktu	Podrobná kontrola produktu	Zkontrolujte produkt.	Výrobce udává životnost výrobku, která je uvedena v uživatelské příručce. Po uplynutí této doby smí uživatel výrobek používat pouze v případě, že jej zašle zpět výrobci ke kontrole. Poté výrobce určí další životnost výrobku a datum příští kontroly.

Seznam všech náhradních dílů je k dispozici ke stažení po výběru produktu na
www.akces-med.com



11. OZNAČENÍ

11.1 SYMBOLY

	Prohlášení, že výrobek splňuje podstatné požadavky
	Katalogové číslo
	Sériové číslo
	Prosím přečtěte si návod před použitím
	Musíte přijmout zvláštní opatření
	Výrobce
	Datum výroby
	Produkt neobsahuje latex
	Ukladněte na suchém místě
	Je zakázáno používat bez zapnutých bezpečnostních pásů
	Chraňte před slunečním zářením
	Limit skladovací teploty
	Relative humidity storage

	Nechlorovat
	Nežehlit
	Nesušit v sušičce
	Nebělit
	Sušte vertikálně
	Opatrně! Delikátní obsah
	Zákaz ponechat uživatele bez péče během používání produktu
	Je zakázáno chodit po schodech nahoru nebo dolů; Nezáleží na tom, zda je uživatel umístěn v kočárku.
	Je nutné číst doplňující informace
	Je nutné zmáčknout tlačítko ukázané na obrázku
	Musíte použít nástroje uvedené v popisu montáže

11.2 PŘÍKLAD ŠTÍTKU

QR KÓD po naskenování, budete přesměrováni na web produktu

ADRESA VÝROBCE

DATUM VÝROBY

SÉRIOVÉ ČÍSLO VE FORMÁTU ČÁROVÉHO KÓDU

NÁZEV PRODUKTU

ČÁROVÝ KÓD

NOSNOST

OZNAČENÍ PODÍVEJTE SE NAHORU

SERIAL NUMBER

AKCES-MED Sp. z o.o.
Jasionka 955B
36-002 JASIONKA
POLAND

MAX LOAD: 40 kg

07 2021

MD

CE

KUKINI
WÓZEK SPECJALNY INWALIDZI

KUKINI
SPECIAL NEEDS STROLLER

5 906395 19592

KN 024/P/4/AF

DISTRIBUTOR



Hřebečská 2678
272 01 Kladno

VÝROBCE



Akces-MED LTd.

Jasionka 955B
36-002 Jasionka
POLAND ph. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com
BDO: 000031619



akces-med.com

Datum vydání: 20.04.2022
Datum poslední aktualizace: 20.04.2022
© Sławomir Wroński 2022