

## Ocelový invalidní vozík, vyztužený


Kód výrobku: K7

### 1. Provedení

Vozík je vyroben z ocelového rámu s práškovým nástřikem. Má odolné sedadlo vyrobené z plastu odolného proti nečistotám a vodě. Rám vozíku byl speciálně vyztužený, aby vydržel zatížení až 225 kg. Loketní opěrky mají funkci demontáže a jsou k dispozici v krátké verzi umožňující blízký přístup k desce stolu. Kočárek je vybaven pevnými zadními 24" plastovými koly a předními plnými pryžovými koly o průměru 8". **Sada obsahuje:** rám kočárku se sedátkem, stupačky s podnožkou, montážní klíč.

### Součásti vozíku:

- a. madlo
- b. loketní opěrka
- c. pojistný kolík
- d. parkovací brzda
- e. hnací obruč
- f. stupačka
- g. montážní kolík stupačky
- h. nastavení těžiště

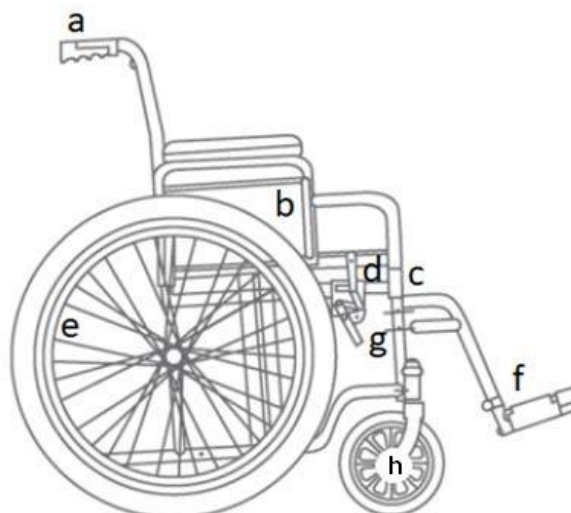

## **2. Použití**

Ocelový invalidní vozík je pomocné zařízení pro osoby, které mají problémy se samostatným pohybem a pro osoby s dysfunkcemi a pohybovými omezeními. Je poháněn silou rukou uživatele nebo vedením doprovázející osobou. Lze jej použít v interiéru i exteriéru.

### **Postup pro ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ Krok 1. Rozložení vozíku**

Invalidní vozík musí být umístěn na zemi. Uchopte madla na zadní straně záďové opěrky vozíku a rozložte vozík. Poté stiskněte okraje sedačky vpředu a vzadu tak, aby všechny prvky vozíku do sebe zapadly.

**Pozor! Netahejte silně za loketní opěrky.**

### **Krok 2. Montáž stupaček**

Nainstalujte pravé a levé stupačky do přední části hlavního rámu tak, že je umístíte na dva čepy a otočíte je dovnitř, dokud se nezajistí.

### **Krok 3. Nastavení stupaček**

Pro nastavení výšky plošiny stupačky odšroubujte křídlový šroub a utáhněte zajišťovací kolík. Poté prodlužte nebo zkráťte délku stupačky zatažením za její spodní část, dokud aretační čep nezapadne. Po nastavení správné výšky utáhněte křídlový šroub.

Plošiny stupaček ponechte v přiměřené vzdálenosti od země, protože příliš nízké uspořádání plošin stupaček může způsobit potíže při pohybu vozíku v případě takových překážek, jako je obrubník. Výška stupaček by měla být nastavena tak, aby úhel mezi trupem a stehny byl přibližně 90° (uživatel tak bude mít optimální polohu při sezení).

**Po dokončení výše uvedených kroků je vozík připraven k použití.**

## **OPĚTOVNÉ SLOŽENÍ VOZÍKU**

- Chcete-li to provést, sklopte postupně pravou a levou plošinu stupačky nohou tak, že ji uchopíte za spodní část a vytáhnete ji nahoru. Poté uchopte a zatáhněte za zajišťovací páku a současně

otáčejte stupačkou směrem ven a poté stupačku vytáhněte z montážního otvoru.

- Poté uchopte střed sedadla vpředu a vzadu, vytáhněte jej nahoru tak, aby rám vyskočil ze spojovacích prvků.

## **FUNKCE DEMONTÁŽ LOKETNÍCH OPĚREK**

- Chcete-li odstranit loketní opěrku, stiskněte pojistný kolík umístěný v přední části loketní opěrky a poté vyjměte celou loketní opěrku z montážních otvorů.
- Pro zpětnou montáž loketní opěrky vložte zadní část loketní opěrky do montážního otvoru a poté loketní opěrku zavřete, dokud pojistný kolík nezapadne.

## **FUNKCE PARKOVACÍ BRZDY**

- Pro zablokování kol posuňte brzdovou páku dopředu, dokud se kolo zcela nezablokuje (zvlášť pro levé a pravé kolo). Vezměte prosím na vědomí, že parkovací brzda zablokuje kola pouze při zastavení.

## **SEŘÍZENÍ PARKOVACÍCH BRZD**

Správné zablokování parkovací brzdy závisí na jejím seřízení a nastavení. Brzdový dřík by měl být nastaven tak, aby brzdová destička bezpečně zablokovala kolo a páka nenarážela na nadměrný odpor.

- V případě nadměrného odporu mírně posuňte hřídel dopředu vyšroubováním aretačního šroubu umístěného na druhé straně brzdy ( zevnitř vozíku) a nastavením do takové polohy, aby brzda zablokovala kolo snadno a bez odporu.
- Pokud se brzdová destička zcela nedotýká kola a dostatečně jej neblokuje, postupujte podle výše uvedeného postupu a pohybujte destičkou brzdy v opačném směru.

## FUNKCE NASTAVENÍ PRO OSOBY PO AMPUCI DOLNÍ KONČETINY

**Pozor!** Pro profesionální nastavení kontaktujte prodejce nebo jinou osobu s odpovídajícími znalostmi a kvalifikací. Nenastavujte úhel sklonu sami.

- Aby Pro nastavení těžiště postupně vyšroubujte upevňovací šroub v pravém a levém předním kole. Poté nastavte úhel sklonu sedadla pohybem osy upevnění kola nahoru nebo dolů, stejným způsobem u obou kol.
- Úhel sklonu sedáku by měl být nastaven tak, aby uživatel nesklouzl z vozíku a zároveň aby mu nastavení nebránilo ve volném pohybu uvedením zadních hnacích kol do pohybu.

### 3. Technická specifikace

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Celková šířka            | 80 cm (v rozm. 56 cm)         |
| Celková šířka            | 85 cm (v rozm. 61 cm)         |
| Celková hloubka          | 123 cm                        |
| Výška sedáku od země     | 52 cm                         |
| Celková výška            | 93 cm                         |
| Rozměry sedáku           | 56 cm x 47 cm / 61 cm x 47 cm |
| Hmotnost: velikost 56 cm | 23,5 kg                       |
| Hmotnost: velikost 61 cm | 24,5 kg                       |
| Max. zatížení            | 225 kg                        |
| Složené rozměry          | 45 cm                         |
| Barva rámu               | Stříbrno - černá              |

## 4. Poznámky a doporučení

**Timago International Group nenesse odpovědnost za nesprávné použití produktu, nedodržení bezpečnostních pravidel a použití, které není určeno.**

## 5. Čištění a údržba

Měla by být prováděna pravidelná údržba komponentů invalidního vozíku:

- Čalounění lze čistit studenou nebo teplou vodou pomocí vlhkého (ne mokrého) hadříku a bez použití saponátů. Odolnější skvrny by se měly čistit houbou. Uchovávejte v suchu mimo zdroje tepla.
- Plastové prvky by se měly čistit vlhkým hadříkem, případně s použitím čisticích prostředků na plasty. Při používání čisticích prostředků dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní pravidla.

## 6. Podrobnosti o záruce

Na všechny produkty distribuované naší společností se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi při nákupu. Zároveň bychom rádi upozornili, že si pro účely záruky musíte uschovat doklad o koupi (účtenka nebo faktura).

## 7. Označení

|                                                                                     |                  |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Referenční číslo |  | Výrobce              |
|  | Sériové číslo    |  | Datum výroby         |
|  | Číslo série      |  | Zdravotnická pomůcka |

|                                                                                   |                                                                            |                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Pozor                                                                      |  | Přečtěte si manuál |
|  | Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky. |                                                                                   |                    |

Celá nabídka je Vám k dispozici u našich distributorů. Více se dozvíte na: [www.timago.com](http://www.timago.com) **Děkujeme, že jste si vybrali Timago!**



Timago International Group  
 Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa ul.  
 Karpacka 24/12  
 43-316 Bielsko-Biała, Polsko

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11  
E.: info@timago.com



2. vydání, datum aktualizace 29.03.2021