

STEELMAN XL

04-010B

WÓZEK INWALIDZKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI
ODOLNÝ INVALIDNÍ VOZÍK
ZOSÍLENÝ INVALIDNÝ VOZÍK
INVALIDSKI VOZIČEK ZA TEŽKE OBREMENITVE

i

PL Instrukcja obsługi
CZ Návod k použití
SK Návod na použitie
SL Navodila za uporabo




PL Niniejszą instrukcję obsługi POWINIEN otrzymać użytkownik produktu.
PRZED ROZPOCZĘCIEM korzystania z tego produktu **NALEŻY** przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu w przyszłości.

CZ Tento návod k použití MUSÍ být vydán uživateli produktu.
NEŽ tento produkt použijete, **MUSÍTE** si přečíst tento návod k použití a uschovat si jej pro budoucí potřebu.

SK Tento návod sa MUSÍ odovzdať používateľovi výrobku.
PRED použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti.

SL Ta navodila za uporabo je TREBA izročiti uporabniku izdelka.
PRED uporabo tega izdelka je TREBA skrbno prebrati ta navodila za uporabo in jih shraniti za morebitno prihodnjo uporabo.

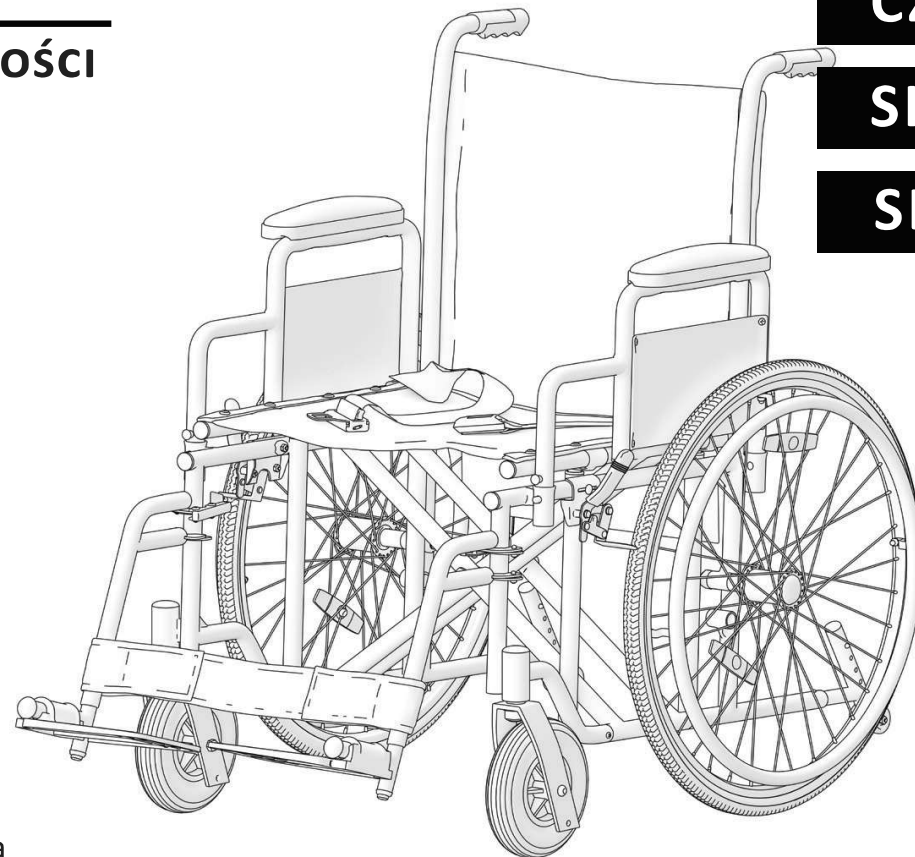

PL

CZ

SK

SL

CZ**SYMBOLY**

V tomto návodu k použití jsou varování vyznačena symboly. Varovné symboly jsou doprovázeny nadpisem, který uvádí závažnost nebezpečí nebo základní informace.



Podává základní informace, doporučení a informace o efektivním a bezproblémovém užívání.



VAROVÁNÍ / UPOZORNĚNÍ — vyznačuje, že za provozu zařízení je třeba dbát opatrnosti. Značí, že aktuální situace vyžaduje pozornost obsluhy nebo zásah obsluhy, aby se zamezilo nežádoucím následkům.



POZOR! Tato značka se používá pro velmi důležité části související s Vaší bezpečností. Podívejte se prosím do návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**VAROVÁNÍ**

Jakékoli jiné použití nebo nesprávné použití by mohlo přivodit nebezpečnou situaci.

**VAROVÁNÍ**

Riziko nehod a těžkých úrazů. Při nesprávném seřízení invalidního vozíku může dojít k nehodě s následkem těžkého úrazu. Seřízení invalidního vozíku musí vždy provádět autorizovaný prodejce.

**VAROVÁNÍ**

Riziko vyplývající z nevhodného stylu jízdy pro dané podmínky. Na mokré podlaze, na šterku a na nerovném terénu bývá riziko uklouznutí. Nikdy nezapomínejte přizpůsobit svou rychlost a styl jízdy podmínkám (počasí, typu povrchu, svým individuálním schopnostem atd.).



VAROVÁNÍ

Riziko úrazu. Při srážce byste mohli utrpět zranění částí svého těla vyčnívajících z invalidního vozíku ven (např. nohou nebo rukou). Zamezte srážkám bez přibrždění. Nikdy nenajíždějte přímo do nějakého předmětu. Úzkými průjezdy projíždějte opatrně.



VAROVÁNÍ

Riziko, že se invalidní vozík vymkne kontrole. Při vysoké rychlosti byste mohli ztratit vládu nad svým invalidním vozíkem a převrátit se. Nikdy nepřekračujte rychlost 7 km/h. Vyhýbejte se srážkám všeho druhu. Nevyužívejte eskalátory. Nejezděte zpátečkou na šikmé ploše.



POZOR

Riziko popálení. Součásti invalidního vozíku se při vystavení vnějším zdrojům tepla mohou rozpálit. Před použitím nevystavujte invalidní vozík silnému slunečnímu světlu. Před použitím zkontrolujte, zda všechny součásti, které přicházejí do styku s Vaší pokožkou, mají přiměřenou teplotu.



POZOR

Riziko zachycení prstů. Vždy existuje riziko zachycení částí těla, jako například prstů nebo paží, do pohyblivých součástí invalidního vozíku.



VAROVÁNÍ

Riziko nehod. Nesprávné seřízení nebo nefunkčnost bezpečnostních zařízení (brzd, zařízení proti převržení) může způsobit nehodu. Před každým použitím invalidního vozíku vždy nejprve zkontrolujte, zda fungují bezpečnostní zařízení, a pravidelně je nechávejte kontrolovat u autorizovaného prodejce.



VAROVÁNÍ

Riziko nehod. K zajištění řádného a správného použití doporučujeme postupovat při používání Vašeho invalidního vozíku podle bezpečnostních pokynů. Tento invalidní vozík byl navržen k zajištění stability při sezení. Každý pohyb na invalidním vozíku má vliv na polohu těžiště, takže by mohl způsobit i převržení vozíku.



VAROVÁNÍ

Riziko udušení. Chraňte prosím děti mladší pěti let před snadným přístupem k invalidnímu vozíku. Vzhledem k tomu, že při výrobě byly použity i malé součástky, hrozí riziko, že je děti spolknou nebo se jimi budou dusit.

**POZOR**

Tento invalidní vozík je vhodný k obsazení nejvýše jednou osobou.

**POZOR**

Za pohybu mějte nohy stále na podnožkách. Nestoupejte na podnožky. Za každých okolností řádně udržujte rovnováhu. Uživatel nesmí přenést své těžiště mimo prostor k sezení.

**POZOR**

Doporučujeme Vám poradit se s Vaším profesionálním zdravotníkem ohledně doporučení, jak na vozík nastupovat a jak z něj sestupovat.. Při přesunu musí být vždy aktivovány bezpečnostní brzdy. Bezpečnostní brzdy nejsou vhodné ke zpomalování invalidního vozíku.

**POZOR**

Dávejte si pozor na rizika ve svém prostředí, jako například úzké dveřní průchody, schody, domácí spotřebiče, dětské hračky atd. Nenahýbejte se k předmětům dále, než kam dosáhnete paží.

**VAROVÁNÍ**

Riziko nehod. Nesnažte se pohybovat se nahoru nebo dolů po svahu pokrytém vodou, ledem nebo olejem či ropným produktem. Nepokoušejte se invalidní vozík zastavit na svažitě ploše.

**VAROVÁNÍ**

Riziko nehod. Nesnažte se přejíždět obrubníky ani jiné překážky. Tím byste mohli přivodit převržení invalidního vozíku a způsobit si tělesnou újmu nebo si poškodit vozík.

**VAROVÁNÍ**

Riziko nehod. Nikdy neponechávejte neobsazený invalidní vozík na svažitém terénu ani na jiném místě, kde by mohl způsobit úraz okolních osob nebo poškození věcí.
Očekávaná životnost je 5 (pět) roků za předpokladu, že bude produkt každodenně užíván v souladu s bezpečnostními pokyny, pokyny k údržbě a doporučeným použitím, jak je uvedeno v tomto Návodu k použití. Poté bude třeba invalidní vozík recyklovat. Invalidní vozík nevyhazujte do běžného domovního odpadu (viz kapitolu „LIKVIDACE“).

OBECNÉ

ÚVOD

Tento návod k použití obsahuje důležité informace o správné manipulaci s výrobkem. Abyste zajistili bezpečné používání výrobku, důkladně si přečtěte návod k použití a postupujte podle bezpečnostních pokynů.

Typ svého invalidního vozíku a jeho jedinečné identifikační číslo najdete uvedeny na štítku přilepeném na cedulce na pažní podpěře a na kovové příčné vzpěře pod sedadlem.

Např. Okrouhlá nálepka s číslem (například 51 nebo 55) na sukňovém chrániči značí, že rozměr (šířka sedadla) Vašeho křesla je 51 nebo 55 cm.

Pamatujte, že v tomto dokumentu mohou být části, které se Vašeho produktu netýkají, protože tento dokument pojednává o všech dostupných typech. Není-li uvedeno jinak, každá z částí tohoto dokumentu pojednává o všech modelech produktu.

PŘEDMLUVA

Děkujeme Vám za důvěru, kterou prokazujete značce Kid-Man. Každý výrobek je v továrně zkontrolován a opouští nás v bezvadném stavu. Přejeme Vám mnoho úspěchů a doufáme, že invalidní vozík od UAB Kasko Group | Kid-Man® bude mít pozitivní dopad na Váš každodenní život.

ZÁRUKA

Poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Veškeré neoprávněné úpravy provedené bez svolení výrobce budou mít za následek zánik platnosti záruky. Sem patří například překročení maximálních uživatelských zatížení a používání produktu nesprávným způsobem. Záruka platí jen, je-li úplně vyplněn záruční list. UAB Kasko Group | Kid-Man® (dále jen Výrobce) po převzetí reklamovaného zboží od zákazníka v období 4 týdnů rozhodne, zda lze problém řešit cestou záruky. Jestliže se na problém záruka nebude vztahovat a zákazník s tím bude souhlasit, Výrobce, bude-li možno, problém opraví. Veškeré náklady, včetně nákladů na přepravu, musí uhradit zákazník. Záruční oprava neznamena prodloužení záruky.

OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Výrobce nenese zodpovědnost za škody vyplývající z následujícího:

- nedodržení Návodu k použití;
- nesprávné užívání;
- přirozené opotřebení;
- nesprávná montáž nebo seřízení zákazníkem nebo technické úpravy provedené třetí stranou;
- používání neschváleného příslušenství dodaného třetími stranami namísto schváleného příslušenství od Výrobce;
- Neoprávněné úpravy nebo užívání nevhodného náhradního dílu.

NORMY A PŘEDPISY

Tento invalidní vozík vyhovuje požadavkům následujících směrnic:

- a) norma EN 12183:2022 manuální invalidní vozíky — požadavky a metody zkoušek;
- b) PŘEDPIS (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 5. dubna 2017 o lékařských zařízeních, kterým se upravují Směrnice 2001/83/ES, Předpis (ES) č. 178/2002 a Předpis (ES) č. 1223/2009 a odvolávají se Směrnice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.

PROVOZNÍ ŽIVOTNOST

Očekávaná provozní životnost je 5 (pět) roků za předpokladu, že bude produkt používán denně a v souladu s bezpečnostními pokyny, návodem k údržbě a doporučeným použitím, jak je uvedeno v tomto Návodu k použití. Poté bude třeba invalidní vozík recyklovat. Invalidní vozík nevyhazujte do běžného domovního odpadu (viz kapitolu „LIKVIDACE“).

INFORMACE O VÝROBCI

Výrobce Skupina: UAB „Kasko Group“ (registrovaná obchodní známka Kid-Man®)

Adresa: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Litva

Telefon: +370 5 265 0000

E-mail: info@kid-man.com

Web: www.kid-man.com

INFORMACE O VÝROBKU

Výrobek: ODOLNÝ INVALIDNÍ VOZÍK

Typ: SteelMan XL

REF.: 04-010B/51; 04-010B/55



VAROVÁNÍ

Riziko nehod a těžkých úrazů. Invalidní vozík není určen k užívání v motorovém vozidle.

URČENÍ A ZNAČENÍ

Invalidní vozík SteelMan XL je na ruční pohon a smí se používat jen k samostatné nebo asistované přepravě postižené osoby s přechodnou pohybovou neschopností (jako např. zlomeniny nebo úrazy nohou nebo chodidel) nebo dlouhodobou pohybovou neschopností (např. paralýza, svalová a kosterní onemocnění, neurologická onemocnění, problémy s rovnováhou nebo držením těla). Lze je používat v interiéru i v exteriéru. Invalidní vozík se pohání postrkováním okrajů namontovaných na zadních kolech. Buďte asistentem.

i Tento invalidní vozík je třeba podepsat a přizpůsobit Vašemu konkrétnímu zdravotnímu stavu.

KONTRAINDIKACE

Při používání invalidního vozíku v souladu s jeho určením nejsou žádné známé kontraindikace.

ŘÁDNÍ UŽIVATELÉ



VAROVÁNÍ

Riziko nehod. Je zakázáno překračovat maximální bezpečnou nosnost invalidního vozíku.

Zařízení je určeno k zajištění mobility osob s omezením vynucujícím pozici v sedě. Při používání bez pomoci asistenta smí zařízení používat jen osoby fyzicky a mentálně schopné invalidní vozík bezpečně používat (např. pohánět se, řídit, brzdit).




POZOR

Invalidní vozík je vhodný k používání ostatními. Chcete-li tak učinit, musíte invalidní vozík nejprve důkladně vyčistit a dezinfikovat. Poté musí všechny součásti zařízení zkontrolovat prodejce autorizovaného servisu, zda jsou v dobrém celkovém stavu, nejsou opotřebené, a zda je případně není potřeba vyměnit.

ŠTÍTEK PRODUKTU

Identifikační štítek je připevněn na rámu Vašeho invalidního vozíku.

1. Výrobek
2. Model
3. Velikost (šířka sedadla)
4. Maximální zátěž
5. Výrobce / kontaktní údaje
6. Datum výroby
7. Kód UDI / výrobní číslo
8. Značka CE
9. Viz návod k použití

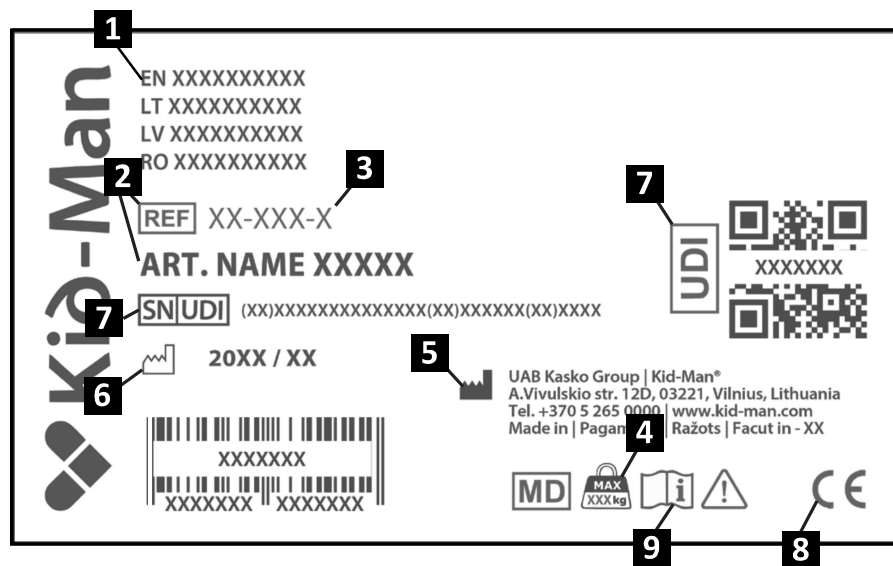

OBSAH BALENÍ


Invalidní vozík SteelMan XL je dodáván v lepenkovém obalu a ve stavu téměř připraveném k použití. Stačí jen připevnit dvojici nožních podpěr na rám. Po vybalení si lepenkový obal prosím uschovejte. Možná jej budete později potřebovat k uskladnění nebo při případném vracení invalidního vozíku prodejci. Až balíček obdržíte, zkontrolujte prosím, zda nebyl poškozen při přepravě.

Jestliže zpozorujete známky poškození, okamžitě to prosím oznamte přepravní firmě.

Zkontrolujte prosím obsah balení, a jestliže budou některé z níže uvedených součástí chybět, kontaktujte svého místního prodejce.

Obsah balení:

1. 1 složený invalidní vozík
2. 1 pár nožních podpěr
3. 1 seřizovací nástroj
4. 1 holenní popruh
5. 1 pár pojistek proti převržení
6. Návod k použití

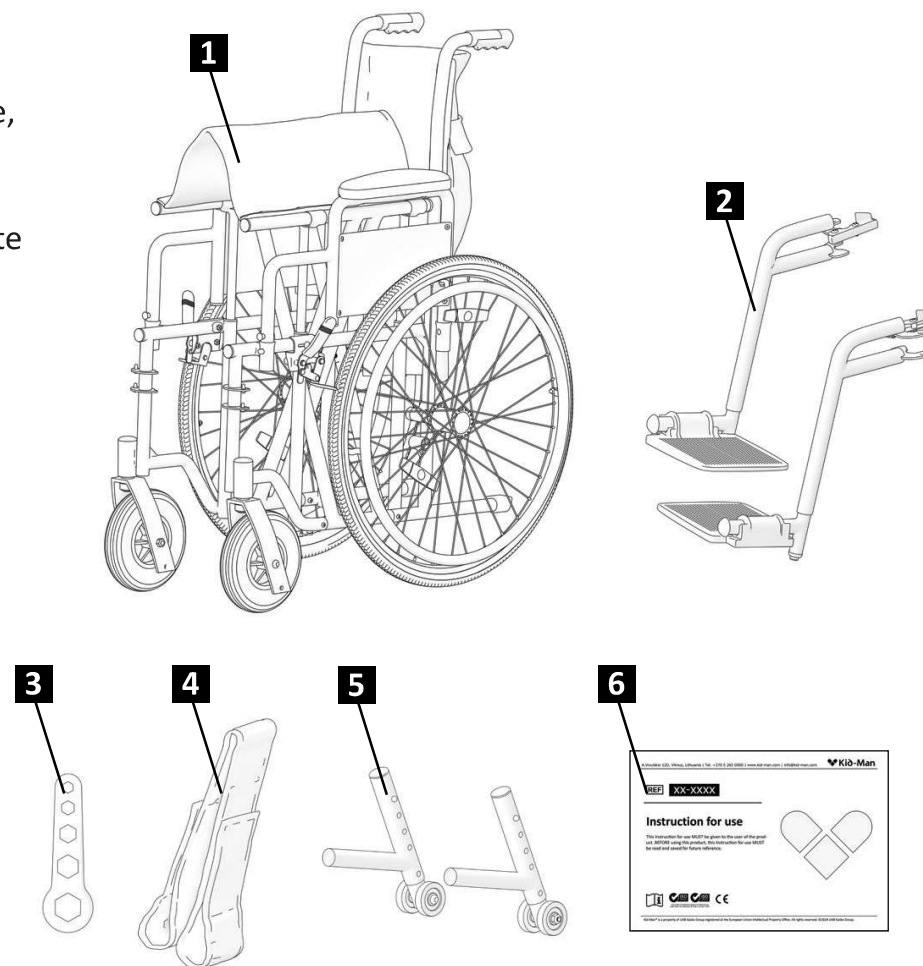


SOUČÁSTI A FUNKCE

Přehled

Toto je invalidní vozík s příčkovým skládacím mechanismem a výklopnými a snímacími nožními podpěrami.

1. Opěrka
2. Přední kolečko
3. Pažní podpěra
4. Páka na sklápění nožní podpěry
5. Nožní podpěra
6. Podnožka
7. Holenní popruh
8. Zadní samohybné kolečko
9. Brzdná páka
10. Asistentovy postrkovací rukojeti
11. Konzola nápravy
12. Sedadlo
13. Popruh sedadla
14. Pojistka proti převržení

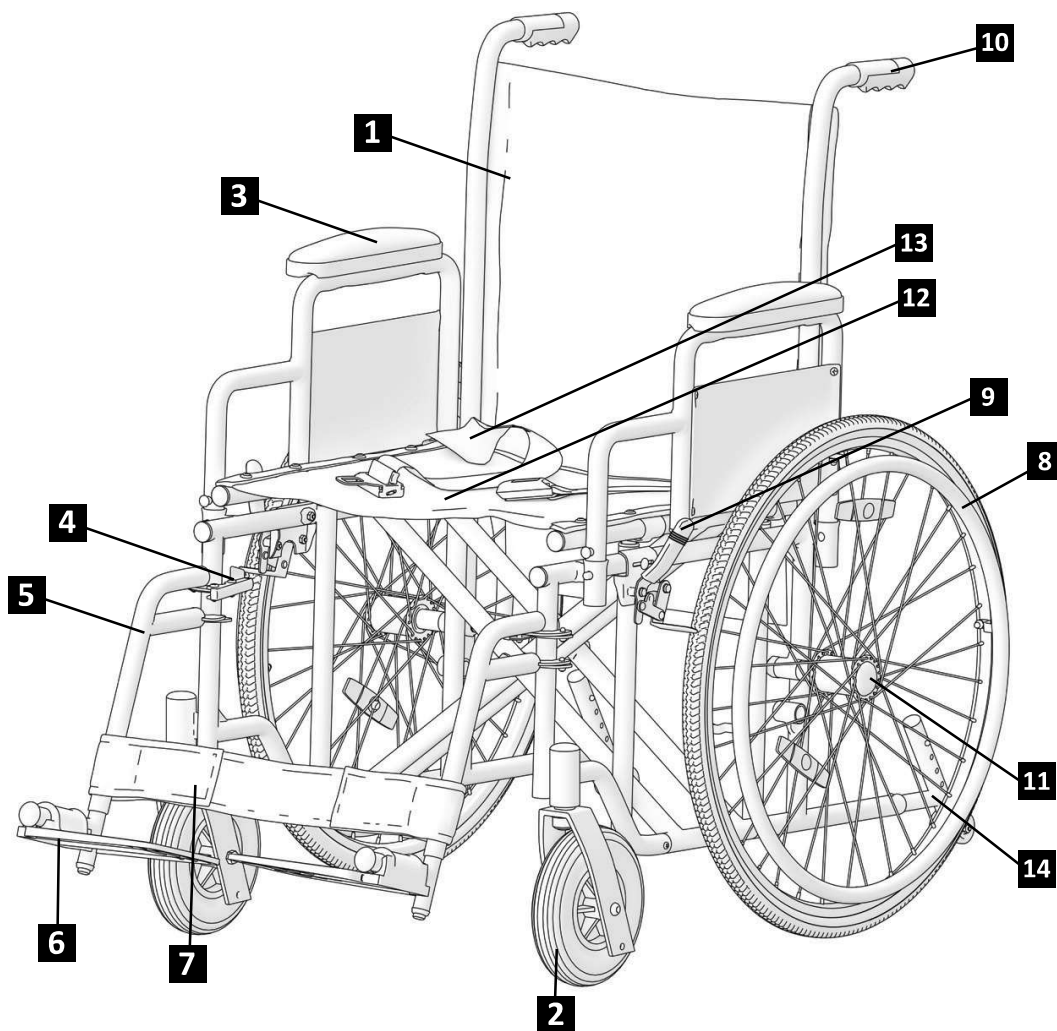


i Sestavování Vašeho invalidního vozíku se může mírně odlišovat od invalidního vozíku popsaného v této příručce, protože neustále dochází k nepřetržitému vývoji produktu.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU


Při rozkládání invalidního vozíku:

- Umístěte vozík do polohy přímo před sebou; Naplocho umístěnou rukou stiskněte okraj sedadla nejbližší k Vám, aby se povrch sedadla srovnal do roviny a aby sedadlové trubky byly docela v plastových držácích (obrázek 1). Sedadlový polštář musí být zcela rozložen;
- Dejte nožní podpěry na místa (obrázek 2);
- Stočte nožní podpěru směrem dovnitř (obrázek 3), abyste ji zajistili ve správné poloze (nožní podpěra musí pevně stát).
- Nastavte nožní podpěru do vhodné a pohodlné polohy: stlačte nožní podložku dolů dle vyobrazení na obrázku 4. Vhodná poloha nožní podložky je vyobrazena na obrázku 5.


Obrázek 1

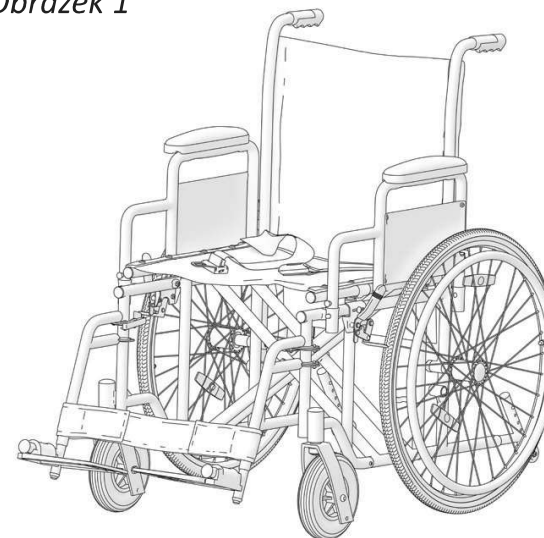


i Nemusíte nadměrně používat energii. Jestliže příliš přitlačíte, můžete nožní podpěru poškodit (např. polámat).

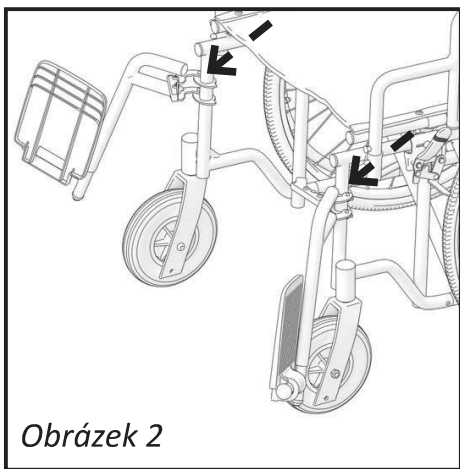


Obrázek 2

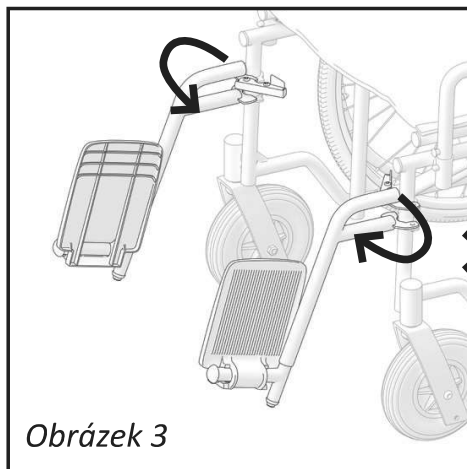

Obrázek 3



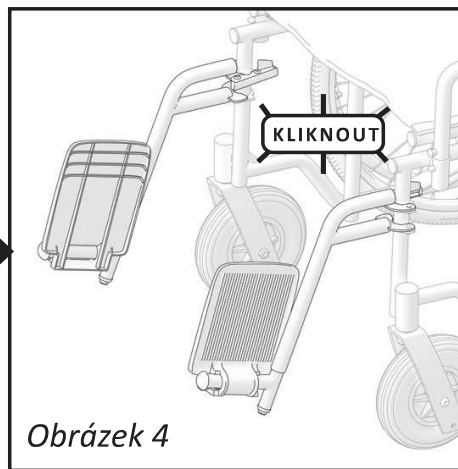


Obrázek 4

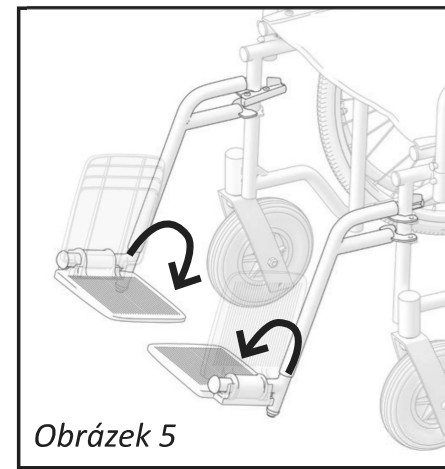

Obrázek 5

Chcete-li invalidní vozík složit, nejprve odstraňte nožní podpěru nebo odklopte podnožky (obrázek 6). Poté dejte ruce na sedadlový čaloun vpředu a vzadu a vytáhněte jej nahoru (obrázek 7).

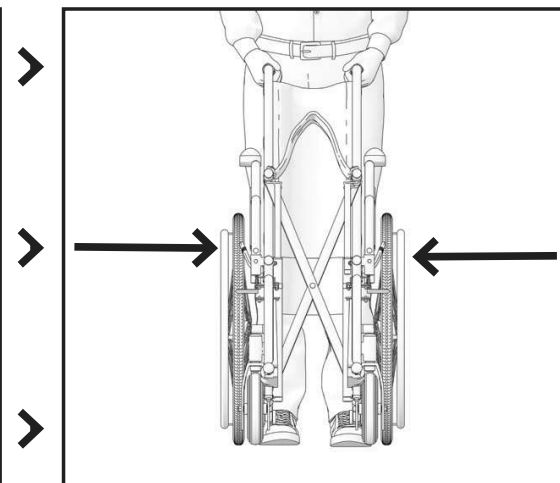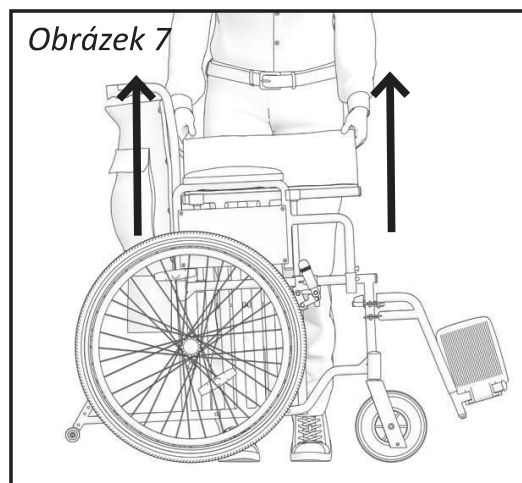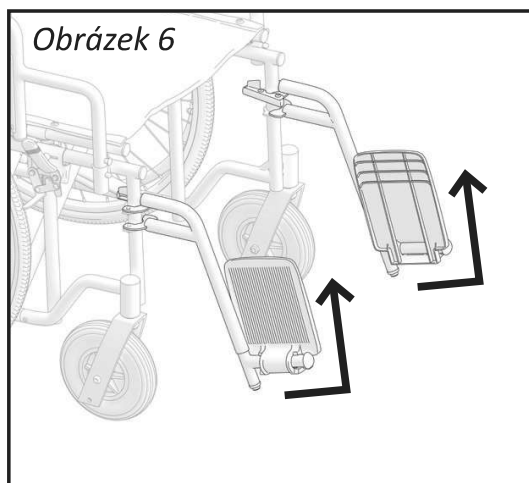

i Abyste zajistili bezpečí a předešli poškození během obsazení, musejí být sundány všechny snímatelné součásti (podpěry paží a podnožky).



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zachycení prstu! Dávejte pozor, abyste neuchopili sedadlovou trubku.



VAROVÁNÍ

Nikdy invalidní vozík nezdvihejte za snímatelné součásti (pažní podpěry, nožní podpěry). Zajistěte prosím, aby všechny snímatelné součásti byly nejprve sejmuty. Snímatelné součásti invalidního vozíku jsou pažní podpěra, nožní podpěra a polštář. Návod, jak je odstranit, najdete v tomto Návodu k použití. Po sejmutí součástí prosím invalidní vozík poskládejte. Po složení jej můžete snadno zdvihnout, když jej uchopíte oběma rukama za rám.

PROVOZ

i Tento invalidní vozík byl navržen k zajištění stability při sezení. Každý pohyb na invalidním vozíku má vliv na polohu těžiště, takže by mohl způsobit i převržení vozíku. K zvýšení svého bezpečí můžete použít bezpečnostní pás.



VAROVÁNÍ

Nejsou žádné polohy bodů určených k ukotvení přídatných zátěží.

NAKLOPENÍ VPŘED




VAROVÁNÍ


Riziko vypadnutí. Jestliže se se svým invalidním vozíkem naklopíte vpřed, riskujete vypadnutí. Nikdy se nenahýbejte příliš dopředu a nevyklánějte se ze svého invalidního vozíku například za účelem uchopit nějaký předmět. Neshýbejte se mezi kolena za účelem uchopení něčeho ze země.

JAK Z INVALIDNÍHO VOZÍKU DOSÁHNOUT NA PŘEDMĚT

Přes sedadlo vozíku smějí přečnívat jen paže. Tělo a hlavu musíte mít stále v mezích sedadla (viz obrázek 8).

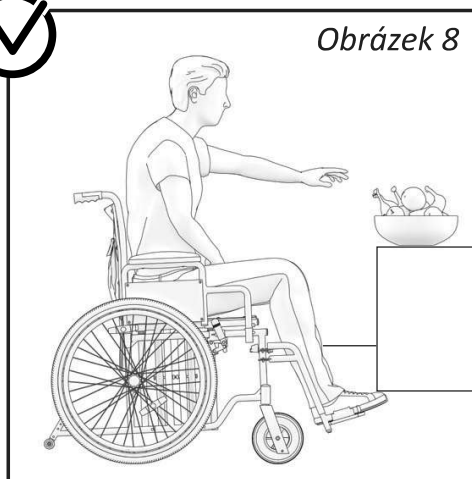

Obrázek 8

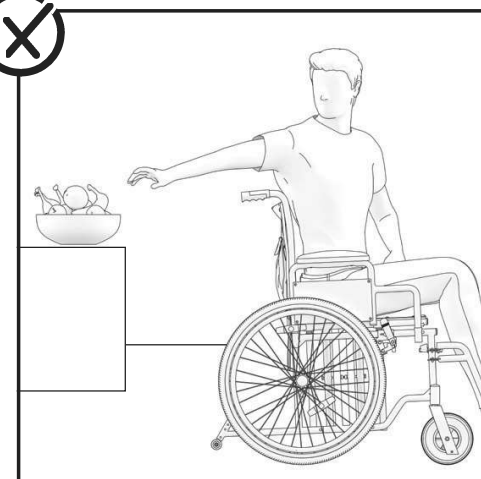

PŘESUN NA CHODNÍK


Doporučujeme Vám pořídit si asistenta, který Vám bude pomáhat s přesuny na chodník.

Doprovod nejprve umístí invalidní vozík přímo před hranu obrubníku. Poté vozík zakloní tak, aby se řídící kola dotkla obrubníku.

Nakonec postrčí vozík přímo vpřed tak, aby zadní kola narazila na obrubník a pak jej znovu postrčí, aby zadní kola přešla přes hranu obrubníku. (Obrázek 9).

Jestliže naklonění vozíku dozadu brání zařízení proti převržení, doporučujeme jej dočasně odstranit do doby, než bude vozík umístěn na chodníku.

Obrázek 9

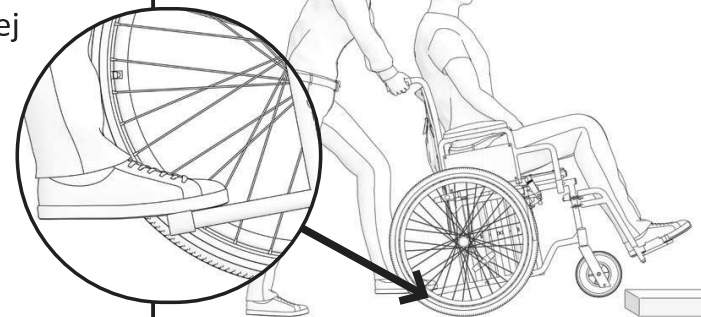

i Vozík naklápějte vzad jen při odstraněném zařízení proti převržení.

PŘESUN

Přesun můžete provádět sami, pokud máte dostatečnou sílu.

Nejprve přistavte invalidní vozík co nejbližší místu, na kterém chcete sedět, tak, aby řídící kola směřovala vpřed. Nasaďte brzdy. Přesuňte své tělo směrem k požadovanému místu. (Obrázek 10).

Obrázek 10



Jestliže pod sebou nebudete za pohybu mít žádnou podpěru, použijte prosím prkno, bude-li možno. Složte nožní podpěru a dejte ji stranou, aby bylo více místa. Předkloňte se, přičemž se opřete o dvě pažní podpěry a postavte se. Pak předsuňte své tělo vpřed směrem k místu, kam se chcete posadit, a přitom přeneste svou hmotnost na své paže a ruce.

Jestliže jste schopni vstát a stát na vlastních nohou, můžete se z jednoho sedadla na druhé přesouvat předkloněním. Jestliže pro Vás tento druh pohybu představuje obtíže, doporučujeme Vám vyžádat si pomoc od doprovázející osoby, aby byl zajištěn snadný a bezpečný přesun. Nejprve aktivujte obě brzdy a zajistěte, aby obě řídicí kola směřovala vpřed. Pamatujte prosím, že o brzdy se nesmíte opírat. Pevně uchopte rukojeť pažní podpěry a podepřete se pažemi, abyste se mohli snadno postavit (předtím se ujistěte, zda je pažní podpěra bezpečně upevněna na svém místě). Asistent Vám případně pomůže s dokončením přesunu. Umístěte se do polohy co nejbližší požadovanému místu. Když budete měnit svou polohu, sedte prosím co nejdále vzadu, aby se nezlomily šrouby, nepoškodily sedadlové polštáře, nebo aby se nepřevrhlo křeslo. Aktivujte dvě brzdy; tyto brzdy se nikdy nesmí používat jako podpora při přesunu. Při sedání ani při vstávání se nikdy nesmíte opírat o nožní podpěry.

SCHODY

Navrhujeme Vám požádat o pomoc dva lidi, jednoho před vozíkem a jednoho za ním, vzhledem ke skutečnosti, že překonávání schodů je poměrně obtížné a nebezpečné. Osoba za vozíkem zakloní vozík dozadu tak, aby byl vyvážen. Pak invalidní vozík postrčí proti prvnímu schodu, přičemž pevně uchopí rukojeť a připraví se tak na zdvihnutí vozíku. Osoba před invalidním vozíkem uchopí boky rámu před vozíkem a zdvihne vozík nad schody, zatímco ta druhá doprovázející osoba došlápne na další schod a zopakuje první proces. Vozík nesnižujte, dokud nepřekonáte poslední krok osoby, která je před vozíkem. Snášení invalidního vozíku ze schodů dolů představuje stejný proces jaký byl vysvětlen dříve, avšak v opačném pořadí. (Obrázek 11)



VAROVÁNÍ

Invalidní vozík prosím neuchopujte za podnožky, protože vzniká možnost, že by se rozpadl.




Obrázek 11

NÁJEZD NA PLOŠINU

Nakloňte se trupem vpřed a pomocí ručních ráfků rychlými pohyby udržujte přiměřenou rychlost.

i Jestliže se budete chtít na cestě zastavit nebo si odpočinout, musíte aktivovat obě parkovací brzdy najednou.

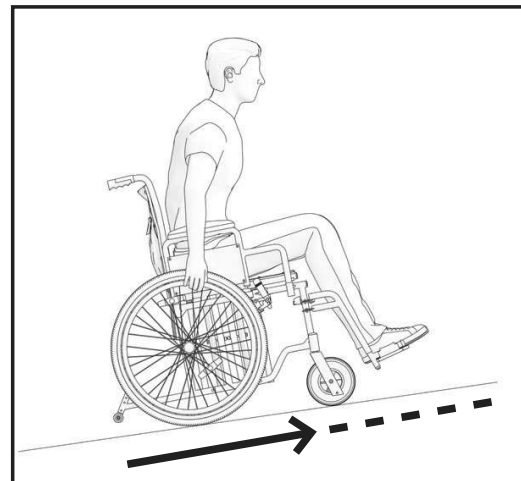

SJEZD Z PLOŠINY



Zakloňte se dozadu a nechejte ruční ráfky běžet (probíhat Vašima rukama), abyste měli nadvládu nad svou rychlostí a směrem.

Neprovádějte náhlé změny směru, nikdy se nesnažte vyjíždět na plošinu úhlopříčně ani z ní úhlopříčně sjíždět, a nikdy se nesnažte s invalidním vozíkem zatáčet při vyjíždění.






VAROVÁNÍ

Tento invalidní vozík nelze používat jako autosedačku.

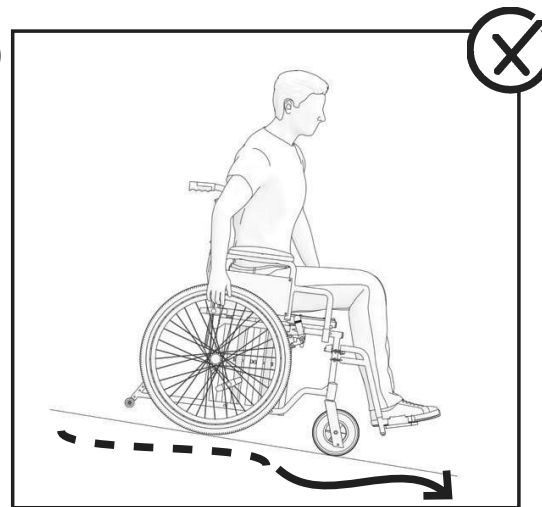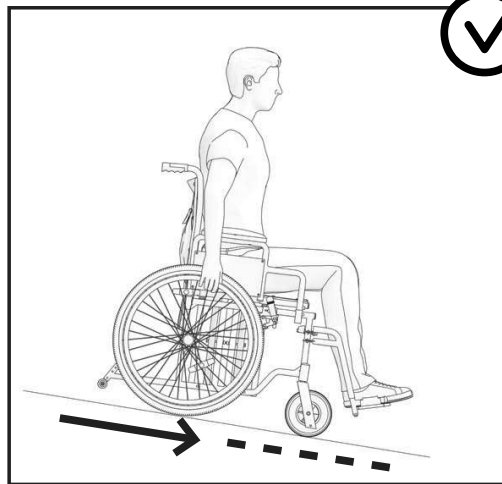

NÁJEZD NA PLOŠINU A SJEZD Z PLOŠINY S ASISTENCÍ

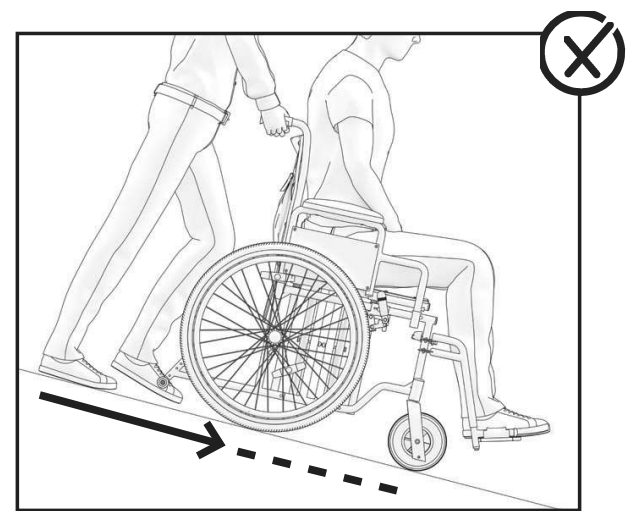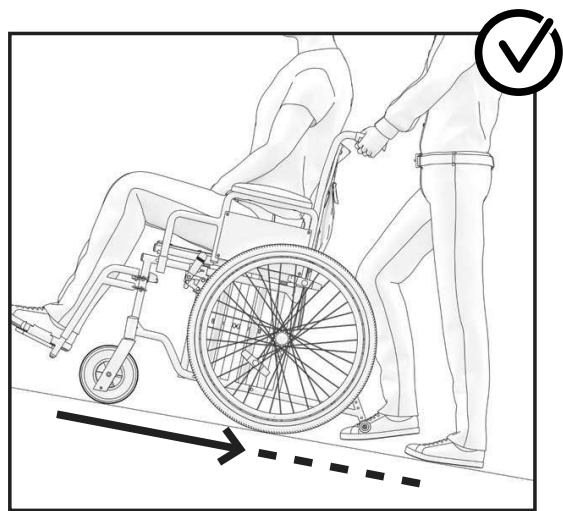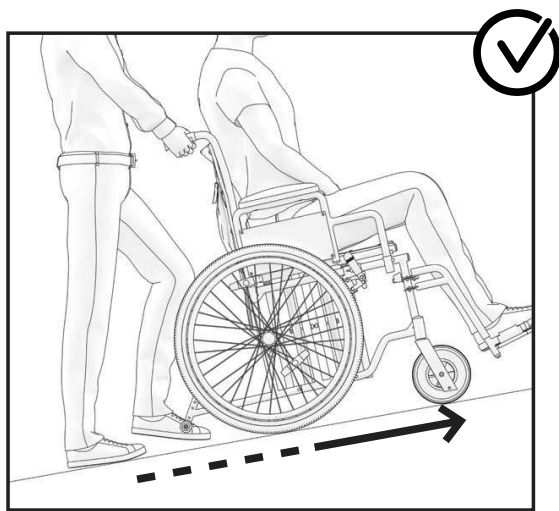


POUŽÍVÁNÍ PAŽNÍ OPĚRKY

Invalidní vozík je vybaven snímatelnou pažní podpěrou. (Obrázek 12).


i Při manipulaci s invalidním vozíkem by pažní opěrky měly být zajištěny.

V případě, že bude potřeba pažní podpěru zcela sejmut, stiskněte prosím kovové tlačítko nacházející se na pažní podpěře vpředu. Ponechte jej stlačenou a zlehka zdvihejte pažní podpěru. Chcete-li ji dát zpátky, opakujte prosím postup v opačném pořadí.

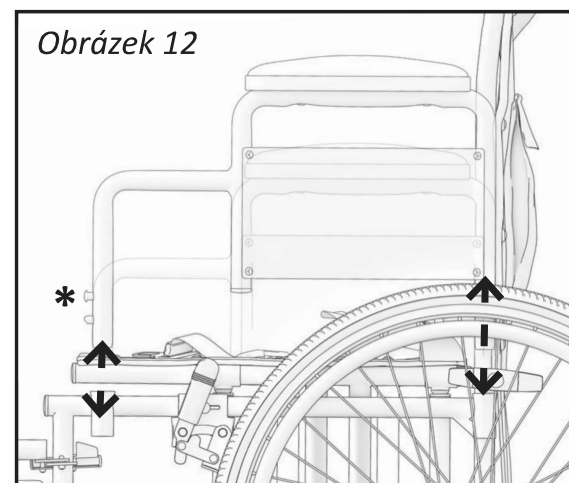

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA

Díky předním kolečkům a zadním kolům máte možnost nastavovat výšku sedadla. Chcete-li nastavit výšku řídicího kolečka, povolte Allenovým klíčem šroub, vytáhněte jej, nastavte jej do požadované výšky a znovu jej dotáhněte. (Obrázek 13) Chcete-li nastavit výšku zadního kola, povolte klíčem šroub osy a usadte zadní kolo do jeho konzoly. Po nastavení na místo jej znovu dotáhněte. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ponechat přední a zadní kola ve stejné výšce.

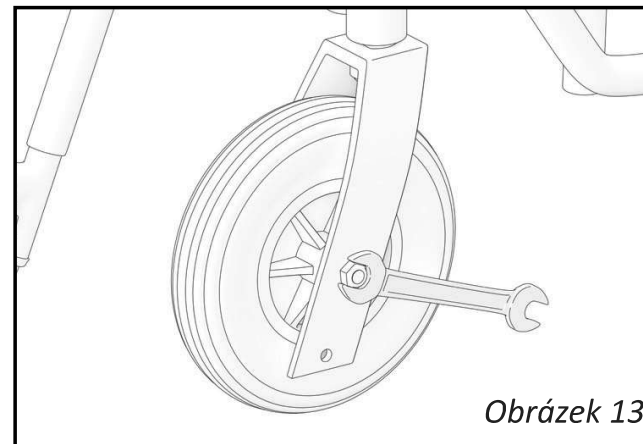


Obrázek 13

ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEVŘZENÍ

Invalidní vozík SteelMan XL je vybaven koly proti převržení. (Obrázek 14) Cílem zařízení proti převržení je zabránit převržení invalidního vozíku dozadu. Lze je použít také k naklonění invalidního vozíku doprovázející osobou.


Výška kol je nastavitelná. Abyste ji mohli nastavit, stiskněte zlatě zbarvené tlačítko na rámu a posuňte trubku.

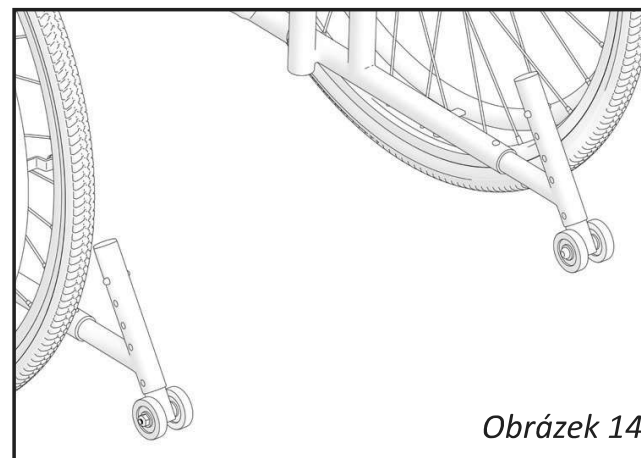

Obrázek 14

BRZDĚNÍ

Váš invalidní vozík má brzdy namontované na rámu z obou stran. (Obrázek 15) Po dodání se brzdy náležitě seřídí, aby byla zajištěna dostatečná brzdící schopnost. Při aplikaci brzd podržte prosím brzdnu páku stisknutou a postrčte ji vpřed. K zajištění maximální bezpečnosti vám doporučujeme používat vždy obě brzdy najednou.

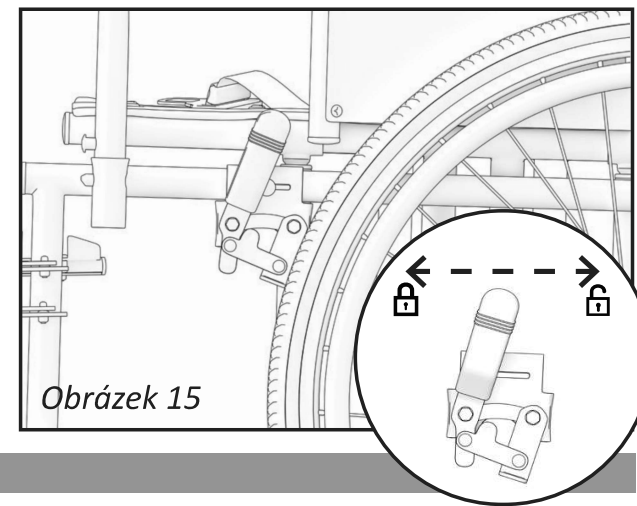


PROVOZ NOŽNÍCH PODPĚŘ

Po dodání budou nožní podpěry zabaleny v samostatné malé lepenkové krabici. Abyste je mohli nainstalovat, vyndejte je prosím z obalu. Nožní podpěra musí být nainstalována vpředu na invalidním vozíku. Při přidávání nožní podpěry ji umístěte na dva kolíky nacházející se na rámu. Pak nožní podpěru zhoupněte směrem dovnitř, aby zacvakla do své polohy.

i **Nezaměňte levou a pravou nožní podpěru!**

Po instalaci musí být hliníková podnožka orientována směrem dovnitř. Až budete invalidní vozík opouštět, musíte nožní podpěru odklopit nebo zcela odstranit. Hliníkovou páčku vytáhněte nahoru a nožní podpěru vysuňte ven. Délku nožní podpěry lze přizpůsobit potřebám uživatele. Abyste mohli upravit délku nožní podpěry, stiskněte prostě kovové tlačítko a vtáhněte vsunutou trubku hlouběji nebo ji naopak povytáhněte ven, podle toho, zda chcete délku zvýšit nebo snížit.

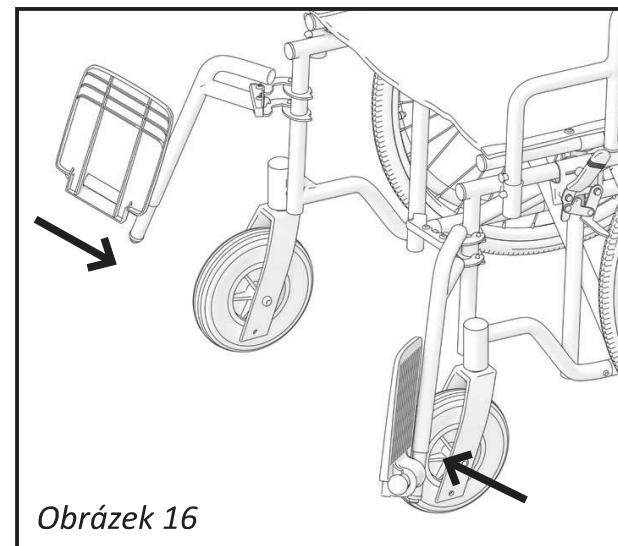

ÚDRŽBA

Aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz, provádějte pravidelně následující kontroly a údržbu, nebo svěřte jejich provedení jiné osobě. Níže naleznete doporučený harmonogram údržby.

	Před použitím	Jednou týdně	Jednou měsíčně	Jednou ročně
Zkontrolujte, zda jsou správně posazena zadní kola		X		
Vizuální kontrola		X		
Zkontrolujte skládací mechanismus			X	
Zkontrolujte brzdy	X		X	
Vyčistěte přední kolečka			X	
Nechteje invalidní vozík zkontrolovat autorizovaným prodejcem				X



VAROVÁNÍ

Opravy, čištění a seřizování invalidního vozíku smí provádět jen autorizovaný servis, a na vozíku přitom nesmí nikdo sedět.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Pomocí vlhkého hadříku očistěte rám, ale i plastové součásti. Na zašlejší špínu můžete použít i šetrný detergent. Kola lze čistit mokřým kartáčem ze syntetických vláken (používat drátěný kartáč se nesmí). Sedadlo a pažní podložky je možno umývat. Použijte šetrný detergent. Použijte běžný neagresivní dezinfekční prostředek. Jestliže si nejste jisti, zda je ten, který používáte, k dezinfekci vhodný, spojte se prosím se svým místním prodejcem.

Písek a mořská voda mohou poškozovat ložiska a ocelové součásti mohou po poškození povrchu rezivět. Invalidní vozík vystavujte písku a mořské vodě jen na krátkou dobu a po každé návštěvě pláže jej vyčistěte.

Invalidní vozík je možno dezinfikovat postřikem nebo otřením vyzkoušenými a schválenými dezinfekčními prostředky.

Postříkejte šetrným čisticím a dezinfekčním produktem a postupujte podle návodu od výrobce.

SKLADOVÁNÍ

Invalidní vozík se musí skladovat v suchém prostředí mimo dosah přímého slunečního záření. Při skladování může být vozík složený. Invalidní vozík by měl být udržován čistý a nezaprášený. To můžete provádět mopem nebo mokrým hadrem a šetrným detergentem. Pravidelně čistěte, přičemž používejte víceúčelový neutrální detergent a teplou vodu. Před použitím prosím zkontrolujte vhodnost příslušných čisticích prostředků a detergentů. Nepoužívejte drhací čisticí prostředky, protože byste tím trvale poškodili povrch a zanikla by platnost záruky.



VAROVÁNÍ

Invalidní vozík nesmí být dlouhodobě vystaven teplotám převyšujícím +40 °C. Jinak by se rám, sedadlo, opěradlo a pažní opěrky mohly rozpálit a způsobit popáleniny.



VAROVÁNÍ

Nikdy nahoře na invalidním vozíku neskladujte jiné předměty.

Po dlouhodobém uskladnění (na dobu delší než 3 měsíce) je nutno invalidní vozík zkontrolovat (viz kapitolu „ÚDRŽBA“).

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Invalidní vozík skladujte za následujících podmínek:

Teplotní omezení: -20 °C až +40 °C;

Relativní vlhkost: 20 % až 75 %;

Atmosférický tlak: 800 hPa až 1060 hPa.

OPAKOVANÉ POUŽITÍ

Tento invalidní vozík je vhodný k opakovanému použití. Musíte provádět následující akce:

Čistění a dezinfekce (viz kapitolu „ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE“);

Inspekce (viz kapitolu „ÚDRŽBA“).

Invalidní vozík je třeba novému uživateli přizpůsobit podle servisní dokumentace.

LIKVIDACE

Bud'te ekologicky uvědoměli a svůj invalidní vozík likvidujte řádným způsobem. Na likvidaci se vztahují národní a místní předpisy. Abyste mohli invalidní vozík řádně recyklovat, kontaktujte prosím svou obec, sběrný dvůr nebo naše servisní oddělení.

SPECIFIKACE

Šířka sedadla	510 mm	550 mm
SteelMan XL (pevné zadní kolo)	04-010B/51	04-010B/55
Celková délka	1050 mm	
Celková šířka	Šířka sedadla +200 mm	
Celková výška	960-1010 mm	
Hloubka sedadla	450 mm	
Výška sedadla	500 - 550 mm	
Výška opěradla	440 mm	
Délka nožní podpěry	400 - 520 mm	
Hmotnost	26,2 kg	26,7 kg

Výška pažní opěrky	230 mm
Rozměry předních koleček	200 x 50 mm
Rozměr zadního kola	610 x 37 mm
Maximální bezpečné zatížení	180 kg
Rám	Ocel
Čalounění	Nylon

i Všechny použité materiály jsou chráněny proti korozi. Používáme jen materiály a součásti odpovídající REACH.

INCIDENTY

Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s používáním zařízení dojde, je třeba nahlásit společnosti UAB Kasko Group | Kid-Man® a příslušnému úřadu členského státu, na jehož území uživatel nebo pacient žije.

KONTAKTY:

Výrobce Skupina: UAB „Kasko Group“ (registrovaná obchodní známka Kid-Man®)

Adresa: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Litva

Telefon: +370 5 265 0000

E-mail: info@kid-man.com

Web: www.kid-man.com

