

Návod k použití a údržbě pasivní antidekubitní matrace Bohemia pro vysoké riziko dekubitů



Varianty:

- MATRACE BOHEMIA ERGONOMIC 14 NEO ZP
- MATRACE BOHEMIA ERGONOMIC
- MATRACE BOHEMIA ERGONOMIC FLEX
- MATRACE BOHEMIA LUXURA FLEX
- MATRACE BOHEMIA LUXURA
- MATRACE BOHEMIA LUXURA 14 NEO ZP
- MATRACE BOHEMIA EUCATHERM
- MATRACE BOHEMIA EUCATHERM FLEX
- MATRACE BOHEMIA EULASTIC
- MATRACE BOHEMIA EULASTIC FLEX
- MATRACE BOHEMIA LAZY
- MATRACE BOHEMIA LAZY HARD FLEX
- MATRACE BOHEMIA ORTHOPEDIC
- MATRACE BOHEMIA ORTHOPEDIC 17 NEO ZP

Určený účel: Určeným účelem matrace je prevence a léčba dekubitů u pacientů s vysokým rizikem vzniku dekubitů.

Základní UDI-DI: 08595193700216V5

Indikace: Prevence v případě vysokého rizika vzniku dekubitů, léčba dekubitů.



Cílová skupina: Matrace Bohemia pro vysoké riziko dekubitů jsou určeny pro pacienty s vysokém rizikem vzniku dekubitů. Cílová skupina není omezena věkem ani pohlavím.

Popis mechanismu účinku, klinický přínos a účinnost: Antidekubitní prořez horní vrstvy 5 - 7 zónové zdravotní matrace napomáhá ke správnému prokrvení tkání a provzdušnění jádra matrace. Při ležení dochází k rovnoměrnému rozložení tlaku na matraci, což má pozitivní vliv na krevní oběh, regeneraci svalů a eliminaci vzniku dekubitů. Jádro je složeno z PUR pěn. Matrace je tvrdé tuhosti. Potah SAFR splňuje normy paroprodyšnosti a nepropustnosti, je pratelný do 95 °C.

Kontraindikace, upozornění, výstrahy a zbytková rizika: Antidekubitní matrace Bohemia nesmí být používána u pacientů s nestabilními zlomeninami, poraněním páteře nebo při jiných onemocnění páteře.

Matraci nesmí používat pacienti s těžkými otoky nebo alergiemi na pěnovou hmotu.

U nadměrně se potících pacientů, což podporuje maceraci kůže, musí používání matrace schválit lékař.

Matrace jsou určeny pro pacienty s maximální nosností do 200 kg.

V případě výskytu vyrážky nebo podráždění se poraďte se s ošetřujícím lékařem. V případě přetrvávajících potíží se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Závažnou nežádoucí příhodu, ke které by došlo při používání výrobku, nahlaste prosím výrobci a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Materiálové složení matrace: jádro matrace tvoří vysoce elastické PUR pěny, které jsou prořezané do anatomických zón. Vyztužené bočnice u verzí FLEX zpevňují hrany ložné plochy a jsou odolné proti sesezení a jsou vyrobeny z pěny VH 4060. Matrace je chráněna ještě SAFR potahem.

Matrace splňuje podmínky normy ČSN EN 1334 a použité PUR pěny splňují požadavky na zdravotní nezávadnost dle Öko-Tex Standard 100, třída I. – vhodný i pro děti do tří let.

Potah SAFR (PU)

- voděodolný a zároveň paropropustný potah
- gramáž 180 g/m²
- šitý se zipem do „L“
- ochrana zipu (okapnička)
- možnost praní do 95 °C
- antibakteriální s možností omývání běžnými neutrálními dezinfekcemi



- se sníženou hořlavostí dle normy BS 7175
- s možností potisku na vrchní straně potahu

Návod na použití a oš e tření matrace:

- matraci pokládejte na lamelový rošt s minimálním počtem 24 lamel (s maximální mezerou mezi lamelami 40 mm) nebo pevnou prodyšnou podložku s maximálně 40 mm širokými otvory po cele ploše
- použitím doporučené podložky nebo roštu a pravidelným otáčením zvýšíte životnost matrace a zároveň snižujete její možnou deformaci
- nevhodná podložka: pevná podložka bez možnosti přístupu vzduchu či rošty s velkými mezerami mezi jednotlivými lamelami
- matraci nevystavujte přímému slunečnímu záření ani vlhkému prostředí, uchráníte tím barevné odstíny potahu a prodloužíte životnost matrace
- při snímání a navlékání potahu dbejte na to, aby nebyl poškozen návlek ani jádro matrace nebo nedošlo k poškození zdrhovadla
- doporučujeme matraci během používání min. 4x za rok provětrat

Údržba potahu SAFR (PU) pro nemoc nič ní úče l y

- **Všeobecné**

Výsledkem některých čistících postupů je výskyt drobného zvrásnění povrchu. Tento jev nemá žádný vliv na samotné vlastnosti výrobku.

Pro čištění, dezinfekci a praní nepoužívat látky obsahující formaldehydy nebo fenoly! Maximální povolená koncentrace roztoků chlorových dezinfekčních přípravků (Chloramin) je 0,5 %. Po provedení desinfekce je vždy nutné povrch opláchnout čistou vodou a řádně vysušit.

- **Čištění**

Povrchová znečištění lze odstranit jemnou textilií navlhčenou ve vodě s obsahem saponátového prostředku.

Trvalejší znečištění lze odstranit otíráním alkoholem (methyl, líh) a následně horkou vodou s neutrálním čistícím prostředkem.

- **Desinfekce**

Dezinfekci potahu lze provádět běžnými neutrálními dezinfekcemi v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví (např. roztok chloroxylenu 4,9 g/100 g vody, roztok



2-propanolu 50 ml/m³ vody nebo 0,5 % chloraminový roztok).

Po provedení desinfekce je vždy nutné povrch opláchnout čistou vodou a řádně vysušit.

Pro desinfekci je možné použít parní sterilizátor, je však třeba počítat se zkrácením doby životnosti potahu a garantovaných vlastností.

- **Praní**

Potahy lze prát při teplotě až 95 °C, za použití běžných čisticích prostředků. Nedoporučujeme používání abrazivních prostředků (prášky apod.) a změkčujících přísad.

Potah nelze mandlovat!

- **Žehlení**

Žehlení potahu je zakázáno!

Jádro matrace

Samotné jádro matrace nevyžaduje větší čisticí zásahy. Desinfekce jádra není nutná, postačuje desinfekce potahu. Je vhodné po dlouhodobějším užívání matraci vyvětrat (sejmout potah a uložit jádro matrace na vzdušném místě na 12–24 hodin). Pro jádra lepená z několika vrstev nedoporučujeme použít pro desinfekci parní sterilizaci. Doporučujeme desinfikovat v parních sterilizátorech pouze nelepená jádra matrací. U lepených matrací může dojít k odlepení částí jádra nebo naopak k vytvoření zatvrdlin v místě slepení. Při stanovení režimu a podmínek parní sterilizace je nutné dodržovat parametry stanovené výrobcem parních sterilizátorů.

Balení: Matrace jsou baleny jednotlivě do PE obalů

Skladování: Matraci před použitím ponechte v plastovém obalu, aby se předešlo případnému znečištění. Nevystavujte extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření.

Likvidace: Matraci, jako velkoobjemový odpad, pro likvidaci odneste na sběrný dvůr.

Symbol  je údaj o tom, že prostředek je zdravotnickým prostředkem.

Datum vydání: 5.8.2021, rev. 2.0,

