

HŮl podpůrná hliníková nastavitelná

Ref. 315U10, 315U12, 315U13, 315U14, 315U15, 315U16

1. Základní informace

Vážený zákazníku,

Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o použití zdravotnického prostředku. Jsou určeny k tomu, aby vám pomohly používat produkt správně a bezpečně. Je velmi důležité, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli pokyny. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a vždy je dodržujte.

Společnost Mobilex se snaží své produkty neustále zdokonalovat a vylepšovat. Proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikací a technických údajů produktu bez dalšího upozornění uživatelům.

Zamýšlené použití

Výcházkové hole pro invalidy jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením s omezenou motorikou. Používají se jako ortopedická pomůcka pro podporu rovnováhy při chůzi, sedání a vstávání. Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití.

Indikace

Výrobek je určen pro starší lidi, osoby s omezenou pohyblivostí bederní části, kolen či kyčlí a pro každého, kdo má potíže s udržení stoje a chůze bez dalšího opěrného bodu. Od uživatele je vyžadováno udržení rovnováhy v sedě i ve stoje a také odpovídající schopnost samostatného pohybu.

Kontraindikace

Přípravek se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s rovnováhou nebo poruchou vnímání nebo nedostatečnou svalovou silou k udržení stoje. Vhodný výběr ortopedické pomůcky, přizpůsobené zdravotnímu stavu a potřebám pacienta, musí vždy provést lékař nebo fyzioterapeut.

Oblast použití

Výrobek lze použít v domácí péči, ve zdravotnických zařízeních a léčebnách dlouhodobě nemocných i v nemocnicích.

Zdravotní příhody a nežádoucí účinky

V případě jakýchkoli nežádoucích událostí souvisejících se zařízením kontaktujte výrobce:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že si tuto příručku přečetly všechny osoby používající výrobek.
- Výrobce neručí za škody a/nebo zranění vyplývající z nedodržení návodu k použití.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném technickém stavu.
- Pokud zjistíte nějaké vady nebo chyby, kontaktujte prosím ihned prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a varování výrobce.
- Věnujte prosím pozornost informacím na etiketě produktu.
- Používejte výrobek pouze k popsanému účelu.
- Nestoupejte na výrobek.
- Vyhněte se prosím provádění konstrukčních změn produktu, pokud k takovým změnám nemáte písemný souhlas výrobce.
- Před použitím by měl být výrobek kompletně sestaven, výškově nastaven a zajištěn. Pokud máte v tomto ohledu nějaké problémy, kontaktujte nás.
- Skládací a nastavitelné části mohou představovat nebezpečí, pokud se část těla zachytí v mezeře mezi částmi a uvízne, když se mezera zmenší.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda je výrobek tuhý a dobře utažený.
- Buďte obzvláště opatrní při používání hole na schodech a kluzkých površích.
- Nepřekračujte maximální zatížení uvedené v technických údajích.
- Výrobek pravidelně čistěte.
- Před použitím vždy zkontrolujte stabilitu vycházkové hole.
- Gumové nástavce nesmí být nadměrně opotřebované.

Obsah balení

1 hůl, 1 návod k použití;

Prvotní kontrola

Zkontrolujte, zda obsah balení odpovídá výše uvedenému seznamu. Pokud v této fázi zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozena, okamžitě kontaktujte svého dodavatele.

3. Popis

Popis výrobku

Výcházková hůl se skládá z dřevěné rukojeti, dvou hliníkových trubek, gumového nástavce a tlačítka pro nastavení délky připevněného ke spodní trubce a pojistného kroužku na konci horní trubky. Na hliníkové horní trubce jsou otvory, které umožňují volbu délky hole a (na spodním konci horní trubky) otočný kroužek, který zajišťuje zvolenou polohu hole. Otvory umožňují nastavit délku hole od 80 cm do 103 cm. Pod rukojetí je poutko na zápěstí, které snižuje riziko upuštění hůlky.

Montáž

Tento produkt nevyžaduje montážní návod.

Popis funkcí

Přizpůsobte délku hůlky výšce uživatele. Výška se nastavuje v krocích podle uspořádání otvorů na hliníkové trubce. Tlačítkem se volí požadovaná výška a k zajištění slouží kroužek na konci horní trubky.

- Chcete-li určit délku hůlky, uvolněte pojistný kroužek otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Poté úplně stiskněte tlačítko a pohybujte spodní trubkou, dokud nenajdete na horní trubce správný otvor pro požadovanou výšku. Tlačítko se automaticky uvolní, jakmile zaklapne do příslušného otvoru. Dbejte především na správné umístění tlačítka (musí vyčnívat z otvoru).

- Utáhněte pojistný kroužek otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Před použitím zkontrolujte stabilitu hůlky.
- Nasadte si bezpečnostní pásek na zápěstí.
- Při chůzi by měla být hůl umístěna co nejvíce svisle, tedy co nejbližší k tělu, protože jakákoli jiná poloha může mít za následek pád. Držte rukojeť pevně celou dlaní.

UPOZORNĚNÍ! Po nastavení a před použitím se ujistěte, že je pojistný kroužek utažen, aby bylo zařízení stabilní a pevné. Ujistěte se, že nedochází k nechtěným pohybům. Nedodržení tohoto varování může vést ke zranění osob.

Příslušenství

K tomuto zařízení není dodáváno žádné příslušenství.

4. Technická data

Hůl s nastavením délky	Ref. 315U1x
Dálka	80÷103 cm
Hmotnost	0,4 kg
Max.zatížení	100 kg
Materiál	spodní část: hliník, horní část: hliník, rukojeť: javorové dřevo pokryté vrstvou laku, nástavec: syntetická pryž



MOBILEX A/S
Grønlandsvej 5
DK - 8660 Skanderborg
Tel: +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk



7 40001 406139

WALKING CANE
length adjusted (brown)

CE REF 315U13

≤100 kg

2021.09.22

0001

	kód QR na hlavní stranu		Výrobce
	Označení CE	REF	Referenční číslo
	Postupujte podle návodu k použití		Maximální hmotnost uživatele
	Zdravotnický výrobek		Datum výroby
	Pro použití venku i uvnitř	SN	Sériové číslo

Příklad vzhledu štítku výrobku

Symbols použité na označení produktu

5. Údržba a čištění

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čisticími prostředky a houbou nebo měkkým hadříkem. Zkontrolujte prosím informace o vašem konkrétním produktu a používejte pouze komerční čisticí prostředky, které jsou vhodné pro čištění a dezinfekci (nepoužívejte produkty obsahující alkohol, rozpouštědla nebo abraziva).

Výrobek v podstatě nevyžaduje žádnou údržbu. I přes pevnou konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Proto se doporučuje, aby byl výrobek pravidelně kontrolován odborným servisem. Doporučujeme následující servisní činnosti:

- ✓ Čištění a dezinfekce produktu
- ✓ Rám/produkt by měl být zkontrolován, zda není ohnutý, poškozený, opotřebovaný nebo zkorodovaný
- ✓ Díly podléhající opotřebení jsou kontrolovány a v případě potřeby vyměněny
- ✓ Celkové dotažení výrobku

Očekávaná životnost: Obvykle až 5 let v závislosti na použití.

Skladování: Doporučujeme skladovat v suchu při teplotě nad 0 °C.

Transport

Výrobek je mobilní výrobek, snadno se přepravuje v jakémkoli dopravním prostředku. Během přepravy by měl být výrobek zajištěn tak, aby se vyloučilo riziko neočekávaných pohybů.

Opakované použití

Výrobek je opakovaně použitelný. Před opětovným použitím, kdy má výrobek převzít nový uživatel, musí být výrobek technicky zkontrolován a vydezinfikován v souladu s bodem 5.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

problém	Možná příčina	Řešení
Hůl skřípe	Závitová objímka není dostatečně utažena	Dotáhněte závitovou objímku.

7. Likvidace produktu

Tento výrobek nesmí být likvidován jako komunální odpad, ale měl by být odevzdán do místního recyklačního místa.

8. Záruční podmínky

Mobilex A/S poskytuje 2letou záruku na vady způsobené výrobními chybami nebo vadami materiálu. Záruka se nevztahuje na neoprávněnou opravu nebo použití výrobku v rozporu s jeho určením a tímto návodem. Na díly podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje, pokud opotřebení není způsobeno výrobní vadou. Pokud budou na výrobku provedeny jakékoli úpravy bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na výrobek pozbývají platnosti. V případě poruchy produktu, na kterou se vztahuje tato záruka, informujte prosím svého prodejce nebo Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu a nepokrývá náhradu za případná zranění, materiální škody nebo nemožnost použití výrobku během opravy.

