

CHODÍTKO IMPALA

Art. 312060, 302061, 312062

Uživatelská příručka



Modrý práškový lak
Standardní,
Vysoké a široké modely



Vnitřní a venkovní
8" kola



Skládací kolečkové chodítko
Pohodlné sedadlo
& bezpečné opěradlo



Příslušenství -
kovový košík
(prodává se zvlášť)

CE

1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vysoce kvalitní produkt Mobilex. Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o používání zdravotnického prostředku. Má vám pomoci při správném a bezpečném používání výrobku. Je velmi důležité, abyste si návod před použitím přístroje pečlivě přečetli. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům a vždy je dodržujte. Společnost Mobilex se neustále snaží své výrobky vylepšovat a modernizovat. Proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikací a technických údajů výrobku bez dalšího upozornění.

Zamýšlené použití zařízení

Tento výrobek je zdravotnický prostředek, který byl navržen pro zvýšení mobility osob, které mají potíže při stání nebo chůzi. Chodítka umožňuje těmto osobám znovu získat schopnost vykonávat každodenní činnosti. Chodítka je vhodný pro osoby, které v důsledku různých onemocnění potřebují stabilní oporu při chůzi. Chodítka by měla být používána pouze jako opora při stání a chůzi. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace

Chodítka je zdravotnický prostředek určený na pomoc lidem s funkčním omezením. Indikací k použití jsou onemocnění, která způsobují omezení pohyblivosti a postižení, bránící samostatnému sezení, stání a chůzi. Proto je při provádění výše uvedených činností zapotřebí další stabilní opora. Indikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele odborným lékařem nebo fyzioterapeutem, ale hlavními cílovými skupinami uživatelů jsou starší lidé, osoby s parézou, revmatickým onemocněním a další osoby s omezenou pohyblivostí bederní páteře, kolen nebo kyčlí. Používání výrobku k jiným než výše popsaným účelům je zakázáno.

Kontraindikace

Chodítka nejsou určeny pro osoby, které nedokážou udržet správnou rovnováhu těla ve stoje. Zařízení se nesmí používat, pokud má uživatel problémy s vnímáním. Kontraindikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele. Výběr kompenzační pomůcky vhodné pro daný klinický obraz musí být vždy proveden s pomocí odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Kromě toho dodržujte bezpečnostní informace uvedené v kapitole 2.

Oblasti použití

Výrobek lze použít v domácí péči, zdravotnických zařízeních a zařízeních dlouhodobé péče a v nemocnicích.

Zdravotní příhody a nežádoucí události

V případě nežádoucích událostí souvisejících se zařízením se obraťte na prodejce nebo výrobce:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

Bezpečnostní požadavky

- Ujistěte se, že si tuto příručku přečetly všechny osoby, které přístroj používají.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu.
- V případě zjištění závad nebo chyb musíte okamžitě přestat výrobek používat a kontaktovat prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a upozornění výrobce.
- Dbejte na informace uvedené na štítku výrobku.
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu.
- Na výrobek nestoupejte.
- Neprovádějte na výrobku konstrukční změny, pokud nemáte písemný souhlas výrobce s takovými úpravami.
- Výrobek a brašna nesmí být zatíženy větší hmotností, než je uvedeno v Technických údajích.
- Všechna kola MUSÍ být během používání výrobku po celou dobu v kontaktu s podlahou. Tím se zajistí správné vyvážení chodítka a mělo by se snížit riziko nehod.
- Při montáži nebo seřizování jakýchkoli částí chodítka dbejte zvýšené opatrnosti.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují.
- Chodítka používejte pouze po jeho úplném rozložení a aktivaci blokovacího zařízení.
- Sedačku lze používat pouze tehdy, když jsou aktivovány parkovací brzdy.
- Obě brzdy by měly být vždy aktivovány nebo zablokovány současně.
- Na sedačce není dovoleno převážet osoby nebo předměty, pokud je chodítka v pohybu.
- Parkovací brzdy musí být vždy aktivovány, pokud se chodítka nepoužívá.

Dodávané díly

Zařízení se dodává v papírové krabici. Obsahem balení je:

- ✓ 1 Chodítka ve složeném stavu včetně sedátka, držáku na berle a nákupní tašky;
- ✓ 1 opěrná trubka;
- ✓ 2 rukojeti na tlačení;
- ✓ 1 plastová taška s 2 x šrouby pro nastavení výšky, 2 x plastovými díly a 2 x maticemi.
- ✓ 1 návod k použití;

Předběžná kontrola

Zkontrolujte obsah krabice s výše uvedeným seznamem. Pokud v této fázi zjistíte, že některý díl chybí nebo je poškozen, neprodleně kontaktujte svého dodavatele.

3. Popis

Popis produktu

Chodítko má práškově lakovaný rám a 4 kola. Díky lehkému rámu jej lze snadno složit a nabízí snadné skladování a přepravu. Chodítko se snadno pohybuje a je dostatečně stabilní. Výšku rukojetí pro tlačení lze nastavit. Chodítko je dodáváno s namontovaným sedátkem, držákem na berle a nákupní taškou. Zádovou trubku a madla pro tlačení je třeba namontovat.

Chodítko se skládá z následujících prvků:

1. Tlačná rukojeť
2. Brzdová páka
3. Zajišťovací matice pro nastavení výšky rukojeti
4. Bod uchycení trubky opěradla
5. Držák berle
6. Brzda
7. Zadní kolo
8. Blokovací mechanismus
9. Trubka opěradla
10. Polstrované sedadlo
11. Nákupní taška
12. Přední otočné kolečko
13. Montážní sada pro nastavení výšky rukojeti (umístěná v tašce)

Popis sestavy

- Položte hlavní rám s koly na rovný povrch tak, aby se všechna kola dotýkala podlahy. Stiskněte zajišťovací mechanismus směrem dolů, dokud se rám zcela nerozloží. Zatlačte sedací podložku dolů tak, aby byla ve vodorovné poloze. Vždy se ujistěte, že je rám stabilní a pevný, když je kolečkové chodítko rozložené.
- Zasuňte spodní konce trubek tlačných rukojetí do otvorů nad knoflíky pro nastavení výšky rukojetí. Nastavte obě tlačné rukojeti do stejné výšky podle části **Popis funkce**.
- Připevňte trubku opěradla k rámu tak, že stisknete zajišťovací kolíky konců trubky opěradla a zasunete ji do upevňovacích bodů, dokud oba "nezacvaknou".
- PŘED použitím vždy zkontrolujte, zda je chodítko a přídatná zařízení řádně a bezpečně zajištěny.

Popis funkce

Skládání/rozkládání rámu

Chcete-li rám rozložit, stiskněte zajišťovací mechanismus dolů a dokončete stisknutím tlačných rukojetí, dokud se zajišťovací mechanismus nedostane do vodorovné polohy. Chcete-li rám složit, vytáhněte nahoru popruh, který se nachází uvnitř brašny, a složení dokončete zapnutím parkovacích brzd a stažením rámu k sobě pomocí tlačných rukojetí.

Nastavení výšky rukojetí

Chcete-li nastavit výšku rukojeti, vyšroubujte zajišťovací matici pro nastavení výšky a šroub vytáhněte. Posuňte rukojeť do požadovaného nastavení a vraťte šroub zpět do otvorů v rámu a trubce rukojeti. Pevně utáhněte zajišťovací matici a zopakujte to pro druhou rukojeť.

POZNÁMKA: Obě rukojeti by měly být vždy ve stejné výšce. Správná výška tlačných rukojetí by měla být vždy ve výšce zápěstí uživatele, který stojí s rukama podél těla.

Brzdy

Brzdy se aktivují postupným zatažením za brzdové páky s rostoucí silou. Brzdy jsou plně aktivovány, když se brzdové páky dotknou rukojetí a chodítko se zcela zastaví. Chcete-li brzdění zastavit, pusťte brzdové páky.

Chodítko je také vybaveno funkcí parkovací brzdy. Pro zapnutí parkovací brzdy zatlačte brzdové páky dolů. Chcete-li parkovací brzdu vypnout, zatáhněte brzdové páky zpět do neutrální polohy.

POZOR! Pokud chodítko nepoužíváte, vždy aktivujte parkovací brzdu! Při umístění chodítka na nerovinný povrch musíte vždy aktivovat parkovací brzdu!

POZOR! Brzdy musí být při odstavení chodítka vždy v zablokované poloze! Nikdy nepoužívejte sedačku, pokud nejsou brzdy zajištěny! Při sezení se nikdy nenaklánějte dozadu. Doporučuje se sedět pouze v přední části sedadla.

Příslušenství

Přístroj lze vybavit následujícím příslušenstvím (není součástí standardní výbavy):


- ✓ Kovový koš



4. Technické údaje

Chodítko Impala	Standard Art. 312060	Vysoká Art. 312061	Široký Art. 312062
Výška rukojetí (nastavitelná)	79 – 93 cm	90 – 105 cm	79 – 93 cm
Výška sedadla	53 cm	63 cm	53 cm
Celková šířka v rozloženém / složeném stavu	60 / 27 cm	63 / 35 cm	66 / 27 cm
Šířka mezi rukojeťmi	48 cm	49 cm	53 cm
Délka	70 cm	75 cm	70 cm
Hmotnost	7,4 kg	7,9 kg	7,5kg
Maximální hmotnost uživatele / zatížení brašny	150 kg / 5 kg		
Brzdy	2 s parkovací funkcí		
Velikost kol (přední a zadní)	200 x 35 mm		

Štítek výrobku

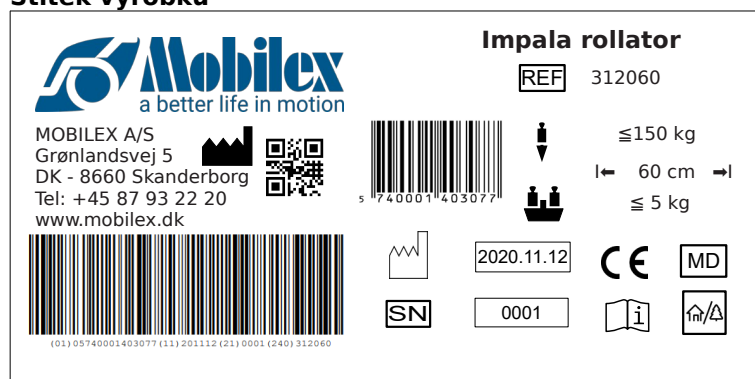

Příklad označení výrobku

Význam ikon

5. Péče a údržba

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čisticími prostředky a houbou nebo měkkým hadrem. Zkontrolujte informace o konkrétním výrobku a používejte pouze komerční čisticí prostředky, které jsou vhodné k čištění. K dezinfekci používejte pouze dezinfekční prostředky certifikované pro použití se zdravotnickými prostředky, které jsou dostupné na místě.

Kola lze čistit teplou vodou s jemným čisticím prostředkem. Po vyčištění je třeba ložiska kol pravidelně mazat olejem nebo když kola začnou vrzat.

Navzdory pevné konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Proto se doporučuje výrobek pravidelně kontrolovat odborným servisem. Doporučujeme následující postup:

- Čištění a dezinfekce výrobku
- Kontrola rámu, zda není ohnutý, poškozený, opotřebený nebo zkorodovaný.
- Kontrola opotřebitelných dílů a jejich případná výměna.
- Celkové dotažení součástí

Doporučená životnost: Obvykle 10 let, v závislosti na použití.

Skladování: Doporučujeme skladovat na suchém místě při teplotách nad 0 °C.

Doprava

Pro přepravu se doporučuje zařízení složit. Zařízení by mělo být přepravováno stabilizovaným a zajištěným způsobem bez rizika náhlých nebo nebezpečných pohybů během přepravy.

Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Než výrobek převezme nový uživatel, musí být přístroj zkontrolován po technické stránce a vydezinfikován podle bodu 5.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Chodítko se obtížně vede nebo tlačí	Nečistoty mezi koly a vidlicemi	Odstranění nečistot nebo vlasů mezi koly a vidlicemi
Brzdy nefungují nebo fungují pouze na jedné straně.	Brzdové čelisti jsou opotřebené nebo brzdy nejsou správně seřizené.	Seřídte brzdy. V případě potřeby vyměňte brzdové čelisti (→ servisní středisko).

7. Likvidace výrobku

Výrobek nelze likvidovat společně s domovním odpadem a je nutné jej odevzdat do místního recyklačního centra.

8. Záruční podmínky

Společnost Mobilex A/S poskytuje dvouletou záruku na škody způsobené chybami ve výrobě nebo chybami materiálu. Záruka se nevztahuje na neúmyslné opravy nebo používání výrobku. Na díly podléhající běžnému opotřebení se záruka nevztahuje, pokud opotřebení není způsobeno výrobní vadou. Pokud jsou na výrobku provedeny změny bez našeho písemného souhlasu, označení CE a záruka na výrobek nejsou platné. V případě poškození výrobku, na které se vztahuje tato záruka, informujte svého prodejce nebo přímo společnost Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu a nezahrnuje náhradu za zranění osob nebo nepoužívání výrobku během opravy. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nedodržením uživatelské příručky.

9. Prohlášení o shodě

Přístroj prošel posouzením shody podle nařízení EU: MDR 2017/745 týkající se zdravotnických prostředků a je označen CE. Pro tento prostředek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je k dispozici na adrese

mobilex.dk/medias/2021-08/ce_impala_rollator_312060_62_8404.pdf

nebo prostřednictvím QR kódu vpravo.

