

CHODÍTKO PANTHER

Art. 318003, 318004

Uživatelská příručka



Lehké chodítko Panther má
hliníkový rám v barvě champagne
Vhodný pro použití v interiéru i
exteriéru
K dispozici ve 2 velikostech
Standard (62 cm)
Small (55 cm)
Testováno pro 150 kg

Výškově nastavitelná
madla
Není potřeba žádné
nářadí
Integrovaná nášlapná
páka a 2 aretovatelné
brzdy



Odnímatelná taška se
dvěma uchy, kterou lze
použít i na nákupy



Chodítko se snadno
skládá do strany a
ve složeném stavu
zabírá minimum
místa pro snadnou
převahu



1. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kvalitní výrobek Mobilex. Tento návod k použití obsahuje popis a důležité informace o používání tohoto zdravotnického prostředku. Má vám pomoci prostředek používat správně a bezpečně. Před použitím prostředku si návod pečlivě přečtěte. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a vždy se jimi řiďte. Společnost Mobilex se neustále snaží své výrobky zlepšovat a modernizovat. Vyhrazujeme si proto právo měnit specifikace a technické údaje výrobku bez předchozího upozornění.

Účel použití prostředku

Tento výrobek je zdravotnický prostředek, který byl navržen ke zvýšení mobility osob, jež mají obtíže se stáním nebo chůzí. Chodítko těmto osobám umožňuje znovu získat schopnost vykonávat každodenní činnosti. Chodítko je vhodné pro osoby, které v důsledku různých onemocnění potřebují stabilní oporu při chůzi. Chodítko smí být používáno pouze jako opora při stání a chůzi. Sedátko chodítko lze použít k krátkodobému posezení a odpočinku. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Indikace

Chodítko je kompenzační pomůcka, která pomáhá osobám s funkčním omezením. Indikací k použití jsou onemocnění vedoucí k omezení hybnosti a postižení, která ztěžují nebo znemožňují samostatné stání a chůzi. Proto je při těchto činnostech nutná dodatečná stabilní opora. Indikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele lékařem nebo fyzioterapeutem. Hlavní cílovou skupinou jsou starší osoby, lidé s parézami, revmatickými onemocněními a další osoby s omezenou pohyblivostí bederní páteře, kolen nebo kyčlí. Používání výrobku k jiným účelům, než jsou výše uvedené, je zakázáno.

Kontraindikace

Chodítko nejsou indikovány pro osoby, které nejsou schopny udržet správnou rovnováhu těla ve stoje. Prostředek nesmí být používán, pokud má uživatel poruchy vnímání. Kontraindikace nelze vztáhnout k jednomu konkrétnímu klinickému obrazu a závisí na individuálním posouzení zdravotního stavu potenciálního uživatele. Volba kompenzační pomůcky vhodné pro daný klinický obraz musí být vždy provedena s pomocí odborného lékaře nebo fyzioterapeuta. Dále dbejte bezpečnostních informací v kapitole 2.

Oblasti použití

Výrobek je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru a může být používán soukromými osobami v domácím prostředí, v domácí péči, ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních i v nemocnicích.

Incidenty a nežádoucí události

V případě jakýchkoli nežádoucích událostí souvisejících s tímto prostředkem kontaktujte prosím prodejce nebo výrobce:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Phone: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

Bezpečnostní požadavky

- Ujistěte se, že si tento návod přečetly všechny osoby používající tento prostředek.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody a/nebo zranění vzniklá v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití.
- Výrobek používejte pouze v bezvadném stavu.
- Pokud zjistíte jakékoli závady nebo poruchy, okamžitě přestaňte zdravotnický prostředek používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte všechna doporučení a varování výrobce.
- Věnujte pozornost informacím uvedeným na štítku výrobku.
- Výrobek používejte pouze k popsanému účelu.
- Nelezte na prostředek, nestoupejte na něj.
- Neprovádějte konstrukční změny prostředku, pokud k nim nemáte písemný souhlas výrobce.
- Prostředek ani taška nesmí být zatěžována vyšší hmotností, než je uvedeno v kapitole Technické údaje.
- Všechna kola musí být při používání ZA KAŽDÝCH okolností v kontaktu s podlahou. Tím je zajištěna správná stabilita chodítko a snižuje se riziko nehody.
- Při montáži nebo nastavování jakýchkoli částí prostředku postupujte opatrně.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují.
- Chodítko používejte pouze tehdy, je-li plně rozložen a zajišťovací mechanismus je aktivován.
- Sedátko smí být používáno pouze tehdy, jsou-li parkovací brzdy aktivovány.
- Obě brzdy musí být vždy aktivovány nebo aretovány současně.
- Není dovoleno převážet na sedátku osobu nebo předměty během pohybu chodítko.
- Parkovací brzdy musí být vždy aktivovány, když chodítko není používáno.

Součásti dodávky

Výrobek je dodáván v kartonové krabici. Balení obsahuje:

- ✓ 1 složené chodítko včetně namontovaného sedátka, zádového popruhu, držáku na hůl a nákupní tašky;
- ✓ 1 návod k použití;

Úvodní kontrola

Zkontrolujte obsah krabice podle výše uvedeného seznamu. Pokud v této fázi zjistíte, že některá část chybí nebo je poškozená, ihned kontaktujte svého dodavatele.

3. Popis

Popis výrobku

Chodítko má 4 kola a hliníkový práškově lakovaný rám. Díky použitým materiálům je celé chodítko odolné proti korozi. Lehký rám usnadňuje skládání, skladování i přepravu. Chodítko se snadno ovládá a je dostatečně stabilní. Výška uchopovacích madel je nastavitelná. Chodítko se dodává s namontovaným sedátkem, zadovým popruhem, držákem na hůl a nákupní taškou. Chodítko je vybaveno odrazkami na madlech, na tašce a na předních vidlicích kol.

Rollátor se skládá z následujících částí:

1. madlo (materiál: PP+TPR)
2. brzdová páka (materiál: PP)
3. horní část držáku na hůl
4. trubka sedáku
5. otvory pro nastavení výšky madla se zajišťovacím kolíkem
6. spodní část držáku na hůl
7. brzda
8. zadní kolo
9. nášlapná páka (tip-pedal)
10. opěrka zad (materiál: PA)
11. skládací zajišťovací klip
12. sedátko s popruhem pro skládání (materiál: PA)
13. nákupní taška (materiál: PA)
14. přední otočné kolo
15. odrazky



Popis montáže

Tento prostředek nevyžaduje žádný zvláštní montážní návod.

Popis funkce

Skládání / rozkládání rámu

Pro rozložení rámu uvolněte skládací zajišťovací klip a zatlačte na trubky sedáku směrem dolů, dokud se rám zcela nerozloží a nezaslechnete „cvaknutí“, které signalizuje, že je chodítko zajištěno v rozložené poloze. Pro složení rámu zatáhněte za skládací popruh a dokončete skládání rámu přitlačením trubek sedáku k sobě a jejich zajištěním skládacím klipem.

UPOZORNĚNÍ! Při rozkládání chodítka musí trubky sedáku na obou stranách pevně zaklapnout do zajištěné polohy. Všechny části musí být před použitím chodítka pevně zajištěny. Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění.

Nastavení výšky madel

Pro nastavení výšky madel stiskněte zajišťovací kolík výškového nastavení a posuňte madlo o jeden stupeň. Opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení, a stejným způsobem nastavte i druhé madlo.

POZNÁMKA: Obě madla musí být vždy ve stejné výšce. Správná výška madel je přibližně v úrovni zápěstí uživatele, stojí-li vzpřímeně s volně spuštěnými pažemi podél těla.

Brzdy

Brzdy lze plynule aktivovat tažením brzdových pák nahoru se zvyšující se silou. Brzdy jsou plně aktivovány, když se brzdové páky dotýkají madel a chodítko je zcela zastaveno. Pro uvolnění brzd jednoduše pusťte brzdové páky. Chodítko je rovněž vybaveno funkcí parkovací brzdy. Pro aktivaci parkovací brzdy zatlačte brzdové páky směrem dolů. Pro uvolnění parkovací brzdy zatáhněte brzdové páky zpět do neutrální polohy.

UPOZORNĚNÍ! Vždy aktivujte parkovací brzdu, když chodítko nepoužíváte! Při umístění chodítka na nerovný nebo nakloněný povrch musíte parkovací brzdu vždy aktivovat!

UPOZORNĚNÍ! Brzdy musí být vždy v aretované poloze, když je chodítko zaparkováno! Nikdy nepoužívejte sedátko, pokud nejsou brzdy zajištěny! Při sezení se nikdy nezaklánějte dozadu. Doporučuje se sedět pouze na přední části sedátka. Nesedejte na tašku.

Nášlapná páka (tip-pedal)

Nášlapná páka usnadňuje uživateli překonávání menších překážek nadzvednutím chodítka směrem nahoru. Nášlapná páka je integrována do rámu.

Odrázky

Chodítko je vybaveno odrazkami na všech stranách, včetně odrazek na madlech, na tašce a na předních vidlicích kol.

Příslušenství

K tomuto prostředku není dodáváno žádné příslušenství.



4. Technické údaje

Chodítko Panther	Art. 318003	Art. 318004
Výška madel (nastavitelná) / výška výrobku	70,5 – 92,9 cm	77,3 – 100 cm
Doporučená výška uživatele	140 – 187 cm	150 – 195 cm
Výška sedu	55 cm	62 cm
Celková šířka – rozložený / složený	67,3 / 22 cm	66,9 / 22 cm
Šířka mezi madly (min / max)	46,5 cm / 49,2 cm	45,1 cm / 47,7 cm
Délka	67 cm	66,5 cm
Hmotnost	6,8 kg	6,8 kg
Max. hmotnost uživatele / max. zatížení tašky	150 kg / 5kg	150 kg / 5kg
Brzdy	2 aretovatelné s parkovací funkcí	
Velikost kol (přední a zadní)	200 x 34 mm	
Šířka sedáku	45 cm	45 cm
Hloubka sedáku	20 cm	20 cm
Průměr otáčení	84 cm	84 cm
Průměr trubek	Kříž rámu Ø22 mm / rám Ø26,25×52 mm	
Materiál	Hliníkový rám, kola z PP a pryže	

Štítek výrobku



Příklad označení výrobku

	Odkaz na domovskou stránku pomocí QR-kódu		Výrobek s označením CE
	Výrobce		Datum výroby
	Dodržujte uživatelskou příručku		Maximální zatížení
	Sériové číslo.		Zdravotnické zařízení
	Číslo položky		Maximální šířka
	K použití v interiéru i exteriéru		Maximální zatížení koše

Význam ikon

5. Péče o výrobek a údržba

Běžné nečistoty lze odstranit běžnými čisticími prostředky a houbičkou nebo měkkým hadříkem. Vždy si prostudujte informace uvedené výrobcem čisticího prostředku a používejte pouze běžně dostupné čisticí přípravky vhodné k čištění. K dezinfekci používejte pouze lokálně dostupné dezinfekční prostředky certifikované pro použití na zdravotnické prostředky.

Kola lze čistit teplou vodou s jemným čisticím prostředkem. Po čištění je vhodné ložiska kol v pravidelných intervalech, případně při začínajícím vrzání kol, promazat olejem.

Navzdory robustní konstrukci a použití odolných materiálů podléhá výrobek opotřebení. Proto doporučujeme, aby byl výrobek v pravidelných intervalech kontrolován odborným servisem. Doporučujeme zejména:

- ✓ čištění a dezinfekci výrobku
- ✓ kontrolu rámu, zda nevykazuje deformace, poškození, známky opotřebení nebo koroze
- ✓ kontrolu dílů podléhajících opotřebení a jejich výměnu v případě potřeby
- ✓ celkové dotažení všech součástí

Doporučená doba používání: obvykle 10 let, v závislosti na způsobu používání.

Skladování: Doporučujeme skladovat na suchém místě při teplotách nad 0 °C.

Přeprava

Pro přepravu se doporučuje prostředek složit. Zařízení musí být přepravováno ve stabilizované a zajištěné poloze tak, aby během přepravy nemohlo dojít k náhlým nebo nebezpečným pohybům.

Opakované použití

Výrobek je vhodný k opakovanému použití. Před tím, než výrobek převezme nový uživatel, musí být zařízení technicky zkontrolováno a dezinfikováno podle kapitoly 5.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

Problém	Možné příčiny	Řešení
Chodítko se obtížně vede nebo tlačí	Nečistoty mezi koly a vidlicemi	Odstraňte nečistoty nebo vlasy mezi koly a vidlicemi
Brzdy nefungují nebo fungují pouze na jedné straně	Brzdové špalíky jsou opotřebené nebo nejsou brzdy správně seřazené	Seřídte brzdy. V případě potřeby vyměňte brzdové špalíky (→ servisní středisko)
Sedátko při rozkládání chodítka správně nedosedne do rámu	Zajišťovací mechanismus je v nesprávné poloze nebo je vadný	Zkontrolujte, zda je zajišťovací mechanismus ve správné poloze. V případě potřeby jej vyměňte (→ servisní středisko)

7. Likvidace výrobku

Výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad a musí být odevzdán do místního recyklačního střediska / sběrného dvora.

8. Prohlášení o shodě

Společnost Mobilex A/S poskytuje záruku v délce 2 let na závady způsobené výrobní chybou nebo vadou materiálu. Záruka není platná v případě neodborných oprav nebo nesprávného používání výrobku. Díly podléhající běžnému opotřebení nejsou kryty zárukou, pokud opotřebení nebylo způsobeno výrobní vadou. Pokud jsou na výrobku provedeny jakékoli změny bez našeho písemného souhlasu, označení CE i záruka na výrobek pozbývají platnosti. V případě poškození výrobku spadajícího do záručních podmínek kontaktujte svého prodejce nebo přímo společnost Mobilex A/S. Záruka se nevztahuje na náklady na dopravu ani nezahrnuje náhradu za újmu na zdraví nebo za nemožnost výrobek používat po dobu opravy. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození vzniklá nedodržováním tohoto návodu k použití.

9. Prohlášení o shodě

Prostředek prošel posouzením shody v souladu s nařízením EU MDR 2017/745 o zdravotnických prostředcích a je označen značkou CE. Pro tento prostředek bylo vydáno prohlášení o shodě, které je k dispozici na adrese:

mobilex.dk/medias/2024-06/ce_panther_318003_04_16406.pdf

nebo prostřednictvím QR kódu uvedeného vpravo.

