

MOPEDIA®

ČEŠTINA

MA RP513_RP520_RRP685B_RP690B_RP691 01 B_CZ_02-2022

ROLLATORS

NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY.....	STR.3
2. ÚVOD.....	STR.3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	STR.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU.....	STR.3
5. UPOZORNĚNÍ.....	STR.4
5.1 Obecná upozornění.....	Str.4
5.2 Upozornění pro použití.....	Str.4
5.3 Varování ohledně stability.....	Str.4
5.4 Upozornění pro montáž.....	Str.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STR.5
7. OBECNÝ POPIS.....	STR.5
.....	STR.5
8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	STR.6
9. POKYNY K MONTÁŽI, VLASTNOSTI A NASTAVENÍ.....	STR.6
9.1 RP690B.....	Str.6
9.2 RP685B.....	Str.6
9.3 RP513.....	Str.7
9.4 RP520.....	Str.7
9.5 RP691.....	Str.7
9.6 Uzavření zařízení rollator.....	Str.8
9.7 Úložný koš.....	Str.8
9.8 Podnos.....	Str.8
9.9 Dolní úložný stojan (RP690B).....	Str.8
9.10 Úložný vak (RP685B).....	Str.8
9.11 Sedadlo (RP690B).....	Str.8
10. ZPŮSOB POUŽITÍ.....	STR.9
11. BRZDY.....	STR.9
11.1 Použití brzdy.....	Str.9
11.2 Zámek brzdy (parkovací brzda).....	Str.9
11.3 Odblokování kol.....	Str.9
12. ÚDRŽBA.....	STR.9
13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	STR.9
13.1 Čištění.....	Str.9
13.2 Dezinfekce.....	Str.9
14. PÉČE O KOLA.....	STR.10
15. OBECNÉ PODMÍNKY PRO LIKVIDACI.....	STR.10
16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STR.10
17. ZÁRUKA.....	STR.11
18. OPRAVY.....	STR.11
18.1 Záruční oprava.....	Str.11
18.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka.....	Str.11
18.3 Výrobky, které nejsou vadné.....	Str.12
19. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STR.12
20. USTANOVENÍ O VYJMUTÍ Z ODPOVĚDNOSTI.....	STR.12

 Zdravotnický prostředek třídy I
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP513 4-kolové hliníkové chodítko rollator se sedadlem ATLANTE MINI

RP520 4-kolové hliníkové chodítko rollator se sedadlem ATLANTE

RP690B Skládací ocelové chodítko rollator se 4 koly DYONE

RP685B Skládací ocelové chodítko se 3 koly CRYO

RP691 Ocelové 4-kolové chodítko rollator s podpěrou předloktí ERA

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení rollator MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A., které je určeno k podpoře osob s obtížemi s pohyblivostí doma i venku, během cestování nebo při jednoduchých každodenních činnostech. Tato uživatelská příručka obsahuje doporučení pro správné používání vybraného zařízení a cenné tipy pro vaši bezpečnost. Před použitím zařízení rollator je vhodné si pozorně přečíst celou tuto příručku. Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na prodejce, který vám bude schopen pomoci a správně poradit.

Poznámky: Zkontrolujte, zda žádné části rollatoru nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce pro další pokyny.

POZOR!



Je zakázáno používat následující výrobek pro jiné účely, než které jsou definovány v následujícím návodu. MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím prostředku nebo použitím jiným, než je uvedeno v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následující příručky bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jejich vlastností.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zařízení rollator je určeno pro osoby s motorickými obtížemi a může být použito jako pomůcka pro usnadnění chůze. Zařízení rollator poskytuje větší stabilitu, oporu a bezpečnost při chůzi.

V každém případě jej nemohou používat osoby s viditelně slabou funkcí ruky a/nebo paže a osoby s problémy s rovnováhou. Chodítko rollator lze používat venku i uvnitř. Doporučuje se používat pouze na povrchy, na kterých se všechny čtyři kola dotýkají země. Nesmí se používat na skalnatém povrchu nebo na šikmých plochách, protože chodítko rollator může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo jiného materiálu.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost MORETTI SpA na vlastní odpovědnost prohlašuje, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny ROLLATOR - MOPEDIA jsou v souladu s platnými ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na vlastní výhradní odpovědnost následující:

1. Tato zařízení splňují obecné požadavky na bezpečnost a výkon podle požadavků z přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Tyto prostředky NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Tyto prostředky NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ ZKOUŠKY.
4. Tyto prostředky jsou uváděny na trh v NESTERILNÍCH obalech.
5. Tyto prostředky jsou považovány za prostředky patřící do třídy I. v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA udržuje a zpřístupňuje příslušným orgánům po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745.

Poznámka: Úplné kódy produktu, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité normy jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých vlastních komunikačních kanálů.

5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná upozornění

- Výrobek NEINSTALUJTE ani nepoužívejte, dokud si nepřetčete a neporozumíte tomuto návodu instrukcí. Pokud nerozumíte varováním, bezpečnostním opatřením a pokynům, obraťte se na zdravotnického pracovníka, prodejce nebo technický personál před pokusem o instalaci, abyste zabránili poškození nebo poranění osob;
- Zařízení rollator by mělo být používáno pouze pacienti s vhodnou motorickou kapacitou, která zaručuje bezrizikové použití;
- Poradte se se svým lékařem nebo terapeutem, abyste zjistili vhodnost výrobku, správné nastavení a správné použití zařízení rollator;
- Váš lékař nebo terapeut by měl pomoci nastavit výšku zařízení rollator pro maximální oporu, pro správnou aktivaci brzdy, pro montáž obecně;
- Zařízení rollator nejsou určena k použití k samo tlačení.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit každou závažnou nehodu, ke které došlo ve vztahu k prostředku výrobci a příslušnému orgánu členského státu sídla uživatele a/nebo pacienta.

5.2 Upozornění pro použití

1. Vždy se ujistěte, že je brzdové lanko správně zajištěno.
2. Po každém seřízení výšky vždy zkontrolujte správné fungování brzdy, abyste se vyhnuli volného a nadměrného ohýbání kabelu.
3. Nedodržení těchto jednoduchých varování může způsobit poranění.
4. Zařízení rollator lze používat pouze na pevném, rovném povrchu. Nepoužívejte zařízení rollator ke stoupání po schodech!
5. Pro udržení rovnováhy se vždy opírejte o obě řídítka.
6. Věnujte zvláštní pozornost mokřím, ledovým nebo zasněženým povrchům.
7. Zařízení rollator nepřetěžujte.
8. Nepoužívejte sedlo chodítka rollator (je-li přítomno) k přepravě věcí nebo osob; sedadlo je určeno pro uživatele se zataženou parkovací brzdou;
9. Během používání musí být všechna kola v kontaktu s podlahou, aby byla zajištěna správná vyváženost chodítka rollator a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedadla musí být zatažena parkovací brzda.

Pozn.: Při použití chodítka rollator v zastavené poloze musí být parkovací brzda zajištěna.

5.3 Varování ohledně stability

- Včetně nakládky košů, pytlů a skladovacích sítí, válečků RP520, RP690B, RP691 RP685B, poskytují pomoc jednotlivci o hmotnosti do 136 kg; zařízení rollator RP689 poskytuje pomoc až do 130 kg; zařízení rollator RP513 poskytuje pomoc až do 100 kg
- Hmotnost koše a sáčku je omezena na 5 kg. Nepřetěžujte zařízení, abyste zabránili nerovnováze a riziku převrácení.
- Spodní nosič (pro RP680B RP691 a RP689) má hmotnostní limit 5 kg. Nepřetěžujte, aby se zabránilo nerovnováze a rizikům překlopení.

5.4 Upozornění pro montáž

- Po namontování nebo otevření zařízení rollator se ujistěte, že je bezpečnostní zařízení upevněno ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty v konstrukci a upevněné pojistnými knoflíky v hlavní podpěře příslušnými křídlovými maticemi a knoflíky bez pohybu.
- Na rám zařízení rollator nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby se zabránilo ohrožení jeho stability.
- Během fáze otevírání a zavírání věnujte pozornost zachycení prstů a/nebo oděvu.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

REF	Kód výrobku
UDI	Jedinečný identifikátor zařízení
CE	Značka CE
	Výrobce
LOT	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k obsluze
MD	Zdravotnický prostředek
	Podmínky pro likvidaci

7. OBECNÝ POPIS


RP513



RP520



RP685B

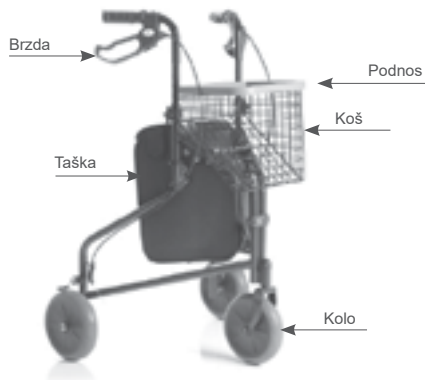

RP690B



RP691



8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím přístroje vždy zkontrolujte:

- zda všechny části zařízení rollator byly bezpečně uzamčeny;
- zda jsou všechny šrouby utažené;
- zda je sedadlo správně uzamčeno (pouze pro RP690B) (pokud tomu tak není, zatlačte sedadlo dolů směrem k rámu);
- zda je správně vloženo zajišťovací zařízení sedadla (pouze pro RP690B);
- Zkontrolujte správné fungování normální brzdy a parkovací brzdy.
- Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků;
- Odšroubujte rukojeť, umístěte rukojeti do požadované výšky, otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček a dobře utáhněte;
- Opakujte pro druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou na svém místě ve stejné výšce.

9. POKYNY K MONTÁŽI, VLASTNOSTI A NASTAVENÍ

9.1 RP690B

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození zařízení rollator se obraťte na nejbližšího prodejce;
- Otevřete zařízení rollator za přední část zatažením za zadní nohy;
- Zatlačte sedadlo dolů, dokud bezpečnostní zařízení nezajistí tyč příčně k rámu zadních kol;
- Vložte trubky rukojeti do konstrukce a pojistné knoflíky do příslušných otvorů;
- Otočte pojistné knoflíky, dokud nebudou trubky rukojeti dobře utaženy;
- Umístěte plastový podnos nad sedadlo;
- Přední koš přidejte zavěšením na dva kolíky pod sedadlem.

9.2 RP685B

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je zařízení rollator poškozeno, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Otevřete zařízení rollator zatažením dvou částí zadního rámu směrem ven, dokud není zajišťovací zařízení zcela vodorovné;
- Vložte trubky rukojeti do konstrukce a pojistné knoflíky do příslušných otvorů;
- Otočte pojistné knoflíky, dokud nebudou trubky rukojeti dobře utaženy;
- Přední koš přidejte zavěšením na dva kolíky ve výšce zajišťovacích knoflíků;
- Nasadte plastový podnos/víko na horní část koše;

- Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků;
- Odšroubujte rukojeť a zcela vyjměte šroub;
- Umístěte rukojeť do požadované výšky otvoru a znovu zasuňte šroub;
- Zašroubujte knoflík a šroub pro zajištění rukojeti;
- Opakujte pro druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou na svém místě ve stejné výšce.

9.3 RP513

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je zařízení rollator poškozeno, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Otevřete zařízení rollator za přední část zatažením za zadní nohy;
- Vložte trubky rukojeti do konstrukce. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud nejsou blokovány.
- Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků. Odšroubujte rukojeť, umístěte rukojeť do požadované výšky, otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček ji zajistěte znovu a pevně utáhněte. Opakujte operaci také pro druhou rukojeť a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.
- Uzavření: Použijte boční tyče a vraťte zpět přední část zařízení rollator.
- Úložný vak je připevněn ke konstrukci zařízení rollator pomocí klipů.
- Než se posadíte, umístěte zařízení rollator na rovný a pevný povrch a poté zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda je pojistná západka bezpečně připevněna a zda je rollator stabilní.

9.4 RP520

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je zařízení rollator poškozeno, obraťte se na nejbližšího prodejce;
- Otevřete zařízení rollator za přední část zatažením za zadní nohy;
- Vložte trubky rukojeti do konstrukce. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud nejsou uzamčeny.
- Nastavte výšku rukojetí pomocí bočních knoflíků.
- Odšroubujte a vyjměte rukojeť, umístěte rukojeť do požadované výšky, vložte a otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček, znovu ji zajistěte a pevně utáhněte. Opakujte pro druhou a ujistěte se, že jsou obě rukojeti umístěny ve stejné výšce.
- Uzavření: Použijte boční tyče a vraťte zpět přední část zařízení rollator.
- Úložný koš je zavěšen na rámu zařízení.
- Než se posadíte, umístěte zařízení rollator na rovný a pevný povrch a poté zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda je pojistná západka bezpečně připevněna a zda je rollator stabilní.

9.5 RP691

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození zařízení rollator se obraťte na nejbližšího prodejce;
- Otevřete zařízení rollator za přední část zatažením za zadní nohy;
- Vložte trubky podpěr předloktí do konstrukce. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud nejsou blokovány.
- Nastavte výšku podpěr předloktí pomocí postranních knoflíků. Vyšroubujte Rukojeť, umístěte podpěru v požadované výšce, otočte rukojeť ve směru hodinových ručiček, znovu upevněte a pevně utáhněte. Opakujte operaci také pro druhou podpěru a ujistěte se, že obě podpěry jsou umístěny ve stejné výšce.
- Uzavření: Použijte boční tyče a vraťte zpět přední část zařízení rollator.
- Zásobník se používá pouze pro malé předměty.
- Úložný koš je zavěšen na rámu zařízení.
- Úložný vak je připevněn ke konstrukci zařízení rollator pomocí klipů.
- Než se posadíte, umístěte zařízení rollator na rovný a pevný povrch a poté zajistěte brzdy.
- Ujistěte se, zda je pojistná západka bezpečně připevněna a zda je rollator.

**POZOR!**

Ujistěte se, že řídítka jsou v souladu se směrem pohybu rollatoru. Pokud řídítka nezůstanou rovná, existuje riziko, že se rollator převrátí nebo ztratí stabilitu, zejména pokud je zatlačen silněji.

9.6 Uzavření zařízení rollator

Proveďte demontáž plastového koše a zásobníku (pokud je k dispozici).

RP690B

Zatlačte páku zajišťovacího zařízení tak, abyste uvolnili příčku rámu. Zatlačte zadní kola směrem k předním kolům, dokud není zařízení rollator zcela uzavřeno.

RP685B

Zatáhněte za páku zajišťovacího zařízení směrem nahoru a zatlačte zadní rám směrem dovnitř, dokud není zařízení rollator zcela uzavřeno.

9.7 Úložný koš

Úložný koš je zavěšen na rámu zařízení.

**POZOR!**

Košík používejte pouze pro malé předměty. Košík nepřetěžujte, abyste předešli nerovnováze a riziku převrácení.

9.8 Podnos

- Zásobník se používá pouze pro malé předměty.

**POZOR!**

Nepokládejte horké, těžké nebo ostré předměty na podnos. Chcete-li podnos připevnit k rámu, vložte držáky na zadní straně zásobníku do otvorů v sedadle.

9.9 Dolní úložný stojan (RP690B)

Spodní úložný box je připevněn ke konstrukci rollatoru pomocí plastových háčků.

**POZOR!**

Maximální nosnost 5 kg. Košík nepřetěžujte, abyste předešli nerovnováze a riziku převrácení.

9.10 Úložný vak (RP685B)

Úložný vak je připevněn ke konstrukci zařízení rollator pomocí klipů.

**POZOR!**

Maximální kapacita tašky je 5 kg. Tašku nepřetěžujte, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení.

9.11 Sedadlo (RP690B)

Než se posadíte, umístěte zařízení rollator na rovný a pevný povrch a poté zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda je pojistná západka bezpečně připevněna a zda je rollator stabilní.

**POZOR!**

Posad'te se a rozložte váhu na celé sedadlo. Nesedějte si a netlačte pouze na jednu stranu.

10. ZPŮSOB POUŽITÍ

- Začněte tlačit, když jste ve vzpřímené poloze s oběma rukama na rukojeti;
- Před použitím rollatoru se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli rizikům uklouznutí;
- Chodte ve vzpřímené poloze s pohledem otočeným dopředu a ne dolů;
- Netlačte rollator příliš daleko od těla, mohlo by dojít k pádu a nevhodnému zatížení;
- Nepoužívejte rollator k přechodu kroků větších než 20 mm;
- Při použití ve venkovním prostředí upřednostňujte chodníky, které jsou řádně připraveny podle předpisů pro odstraňování architektonických bariér.

11. BRZDY

Správné fungování brzd závisí na opotřebení a nečistotách nahromaděných na kolech. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

11.1 Použití brzdy

Chcete-li brzdít, zatáhněte za páčky brzdy prsty nahoru, dokud se rollator nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu rollatoru, uvolněte brzdové rukojeti.

11.2 Zámek brzdy (parkovací brzda)

Stiskněte brzdové páčky dlaní, když uslyšíte „cvaknutí“ a kola jsou uzamčena. Zvedněte brzdové páky z polohy stop.

U rollatoru RP691 zatlačte brzdové páčky prsty dopředu, když uslyšíte „cvaknutí“, kola jsou uzamčena. Uvolněte je zatažením za brzdové páčky.



POZOR!

Když uživatel stojí, musí být brzdy zablokovány.

11.3 Odblokování kol

Vytáhněte obě brzdové páky, dokud se neuvolní.

12. ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA od společnosti Moretti jsou v okamžiku uvedení na trh pečlivě zkontrolována a označena značkou CE. V zájmu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby vhodnost pro použití vašeho zařízení rollator zkontroloval výrobce nebo autorizovaná laboratoř, a to nejméně každé 2 roky. V případě opravy smí být použity pouze originální náhradní díly a příslušenství. Životnost výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1 Čištění

K čištění výrobku používejte pouze hadřík namočený ve vodě a pak jej osušte čistým, suchým hadříkem nebo omyjte vlažnou vodou a neutrálním mýdlem. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku nebo chemickými korozivními látkami použitými při čištění.

13.2 Dezinfekce

Pokud je nutné výrobek dezinfikovat, použijte jemný dezinfekční prostředek.



POZOR! Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují abrazi plastových dílů a korozi kovových povrchů.

14. PÉČE O KOLA

1. Kola očistěte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Osušte čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.

15. OBECNÉ PODMÍNKY PRO LIKVIDACI

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje zařízení zlikvidovat prostřednictvím obecních ekologických ostrovů pro plánované recyklování použitých materiálů.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

DYONE										
Kód výrobku	RP690B									
Sedadlo	38x16x2 cm									
Konstrukce	Ocel									
Rozměry a hmotnosti										
ROZMĚRY V CM										 Nosnost MAX.
RP690B	69	77 98	59 sedadlo 61 nad podnos	58	44	58x24x67 (bez rukojeti)	9,5	20	20	136

CRYO										
Kód výrobku	RP685B									
Sedadlo	-									
Konstrukce	Ocel									
Rozměry a hmotnosti										
Rozměry v CM			-							
RP685B	57	83 98	-	63	24,5	64x28x71 (bez rukojetí)	6,9	20	20	136

ATLANTE MINI										
Kód výrobku	RP513									
Sedadlo	31x31 cm									
Konstrukce	Hliník									
Rozměry a hmotnosti										
ROZ- MĚRY V CM										
RP513	64	71 84	50	54	45	55x25x85	5,9	15	15	100 kg

Série ATLANTE	
Kód výrobku	RP520
Sedadlo	36x39 cm
Konstrukce	Hliník

Rozměry a hmotnosti										
ROZMĚRY V CM										
RP520	68	80 93	56	61	46	26	8,5	20	20	136 kg

ERA										
Kód výrobku	RP691									
Sedadlo	38x16									
Konstrukce	Ocel									
Rozměry a hmotnosti										
ROZMĚRY V CM										
RP691	64	98-120	61	60	44	31	10 Kg	20	20	136 Kg

17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky společnosti Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výjimkou případných vyloučení a omezení uvedených níže. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a nedodržení návodu k použití. Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné výsledné škody, zranění osob nebo cokoli jiného, co bylo způsobeno nebo souvisí s instalací a/nebo používáním zařízení, které pečlivě nedodržuje pokyny uvedené v instalačních, montážních a uživatelských příručkách. Společnost Moretti neručí za vady a poškození výrobků společnosti Moretti v následujících případech: přírodní katastrofy, neoprávněná údržba nebo opravy, poškození vyplývající z problémů s napájením (pokud jsou k dispozici), použití dílů nebo součástí, které nedodala společnost Moretti, nedodržení pokynů a pokynů k použití, neoprávněné úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby, jak je uvedeno v příručce. Tato záruka se nevztahuje na nositelné součásti, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

18. OPRAVY

18.1 Záruční oprava

V případě, že má výrobek Moretti během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, společnost Moretti se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého vlastního uvážení vyměnit nebo opravit položku v rámci záruky u konkrétního prodejce společnosti Moretti nebo ve svých prostorách. Náklady na pracovní sílu spojené s opravou výrobku může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku.

18.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy obdržíte opravený produkt.

18.3 Výrobky, které nejsou vadné

Zákazník bude informován, pokud po přezkoumání a testování vráceného výrobku společnost Moretti dospěje k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a on bude zodpovědný za náklady na dopravu v důsledku vrácení.

19. NÁHRADNÍ DÍLY

Záruka na originální náhradní díly MORETTI je 6 (šest) měsíců ode dne, kdy náhradní díl obdržíte.

20. USTANOVENÍ O VYJMUTÍ Z ODPOVĚDNOSTI

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné jiné výslovné nebo předpokládané prohlášení, záruky nebo podmínky, včetně jakýchkoli prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení a nezasahování. Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku společnosti Moretti bude nepřerušené nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod v souvislosti se spotřebními výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST****Produkt** _____**Zakoupeno dne** _____**Maloobchodní prodejce** _____**Ulice** _____ **Lokalita** _____**Prodáno** _____**Ulice** _____ **Lokalita** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**VYROBENO V P.R.C.**

POZNÁMKA

POZNÁMKA

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com